

Tobii Dynavox Ontsmetting van het apparaat

Benodigde materialen

Reinigingsdoekjes van ziekenhuiskwaliteit of soortgelijke desinfectiedoekjes voor infectiebeheersing.

Toepasselijke producten

Tobii Dynavox I-Series+	Tobii Dynavox PCEye 5	Tobii Dynavox AccessIT 3
Tobii Dynavox I-13/I-16	Tobii Dynavox EyeMobile-beugel	Tobii Dynavox EyeR
TD I-13/I-16	Tobii Dynavox EyeMobile Plus	Tobii M-Series
Tobii Dynavox I-110	Tobii Dynavox PCEye-beugel	Dynavox T-Series
TD I-110	Tobii Dynavox Indi	TD Pilot
Tobii Dynavox PCEye Explore	Tobii Dynavox Indi 7	TD Speech Case Mini
TD Navio	Tobii Dynavox Speech Case	TD SC Tablet Mini
Tobii Dynavox PCEye Mini	Tobii Dynavox SC Tablet	
Tobii Dynavox PCEye Plus	Tobii Dynavox Mobile Mini	

Procedure

Ontsmetten en reinigen

Het apparaat reinigen

1. Schakel het apparaat uit voordat u het reinigt.
2. Haal de stekker uit het stopcontact.
3. Verwijder alle kabels.
4. Veeg alle externe oppervlakken af met een doekje met 70% isopropylalcohol, 75% ethylalcohol of desinfecterende Clorox-doekjes voor infectiebestrijding.
5. Laat het apparaat aan de lucht drogen.
6. Alle meegeleverde accessoires moeten op dezelfde manier worden ontsmet.
7. Als er strepen op het scherm achterblijven, veegt u deze weg met een zachte, droge doek.
8. Gooi gebruikte reinigingsmiddelen op de juiste manier weg.



Gebruik geen sproei producten rechtstreeks op het apparaat, omdat deze het apparaat kunnen verzadigen en er ongewenst vocht in het apparaat kan binnendringen.

Dompel het apparaat niet onder in een vloeistof.

Gebruik geen insectenspray op het apparaat.

Ondersteuning voor uw Tobii Dynavox-apparaat

Online help

Raadpleeg de productspecifieke supportpagina voor uw Tobii Dynavox-apparaat. Hier vindt u actuele informatie over problemen en tips en trucs voor het product.

Onze ondersteuningspagina's vindt u online op: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

Neem contact op met uw productadviseur of wederverkoper

Neem bij vragen of problemen met betrekking tot uw product contact op met uw Tobii Dynavox-productadviseur of erkende wederverkoper voor hulp. Wederverkopers zijn het meest bekend met uw persoonlijke configuratie en kunnen u het beste helpen met tips en producttraining. Ga voor contactgegevens naar <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.