

Dekontaminering av Tobii Dynavox-enhet

Nödvändig utrustning

Rengöringsduk av sjukhuskvalitet eller motsvarande desinfektionsduk för infektionskontroll.

Tillämpliga produkter

Tobii Dynavox I-Series+	Tobii Dynavox PCEye 5	Tobii Dynavox AccessIT 3
Tobii Dynavox I-13/I-16	Tobii Dynavox EyeMobile-fäste	Tobii Dynavox EyeR
TD I-13/I-16	Tobii Dynavox EyeMobile Plus	Tobii M-Series
Tobii Dynavox I-110	Tobii Dynavox PCEye-fäste	Dynavox T-Series
TD I-110	Tobii Dynavox Indi	TD Pilot
Tobii Dynavox PCEye Explore	Tobii Dynavox Indi 7	TD Speech Case Mini
TD Navio	Tobii Dynavox Speech Case	TD SC Tablet Mini
Tobii Dynavox PCEye Mini	Tobii Dynavox SC-surfplatta	
Tobii Dynavox PCEye Plus	Tobii Dynavox Mobile Mini	

Procedur

Dekontaminera och rengöra

Rengöra enheten

1. Stäng av enheten helt innan den rengörs.
2. Dra ur enhetens kontakt.
3. Avlägsna alla kablar.
4. Torka av alla yttre ytor med servetter med 70-procentig isopropylalkohol, 75-procentig etylalkohol eller Clorox Disinfecting Wipe för infektionskontroll.
5. Låt enheten lufttorka.
6. Alla tillbehör måste också rengöras på samma sätt.
7. Om rengöringen efterlämnar streck kan skärmen putsas med en mjuk torr trasa.
8. Kassera använt rengöringsmaterial på rätt sätt.



Använd inte sprayprodukter direkt på enheten eftersom det kan göra den våt och släppa in fukt i den.

Doppa inte enheten i vätska.

Använd inte insektssprej på enheten.

Support för din Tobii Dynavox-enhet

Få hjälp online

Läs den produktspecifika supportsidan för din Tobii Dynavox-enhet. Den innehåller uppdaterad information om frågor och tips & tricks som rör produkten.

Hitta våra supportsidor online på: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

Kontakta din regionsansvarige eller återförsäljare

Kontakta regionsansvarig på Tobii Dynavox eller den auktoriserade återförsäljaren om du har frågor om eller problem med din produkt. De känner till din utrustning och är bäst lämpade att hjälpa dig med tips och träning. För kontaktuppgifter, besök <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.