

כרטיסי אימון



תוכן

1	טיפים להצגת תת"ח
2	להיות שותף מעולה לקומוניקציה ולהתאים אישית את הגדרת העמוד
3	ערוך תא
4	הוספת תא
5	חיפוש מילה ונעילת מצב עריכה
6	הגייה נכונה
7	שמירה ושיתוף הלוחות שלך
8	הצעדים הבאים ושאלות נפוצות
9	myTobiidynavox.com
10	תמיכה נוספת

טיפים להצגת תת"ח

עשה מאמץ קבוצתי



בני משפחה ואנשי מפתח אחרים, צריכים כולם להכיר את TD Snap. אפשר לכל אדם קצת זמן לבחון את האפליקציה ולאתר מילים נפוצות, שעולות בעת האינטראקציות שלהם עם משתמש תת"ח.

שמור את זה בהישג יד



שמור את מכשיר ה-תת"ח איתך נגיש למשתמש בכל עת. תחשוב על מכשיר תת"ח כקול שלו. לעולם לא תהיה בלי קולך והם לא אמורים להיות בי שלהם!

דגם, דגם, דגם



אנשים לומדים שפה על ידי התבוננות והקשבה, ואז מנסים אותה בעצמם. זה הוכח כדרך הטובה ביותר ללמד אנשים לתקשר באמצעות תת"ח. הדגמה כוללת נגיעה ושימוש במכשיר בזמן שאתה מדבר ונמצא באינטראקציה עם האדם. מודל תקשורת באמצעות TD Snap כאשר אתה מדבר עם משתמש תת"ח במשך כל היום. בני משפחה ומטפלים גם צריכים להשתתף בהדגמות.

■ מהות ההדגמה היא הצגת הדרכים לתקשר באמצעות עשייה מעשית.

■ זה אינו מצריך חיקוי.

■ הדגם מילות מפתח במקום כל מילה שאתה אומר.

■ הדגם בזמן שאתה מחפש אחר אוצר מילים.

■ שגיאות הן בסדר. שגיאות נותנות לך הזדמנות להדגים כיצד לתקן.

■ הדגמה אינה בדיקה או בחינה.

צפו בסרטון הציג הדגמה.

qrco.de/bbA7Ur



השב על כל נסיונות התקשורת



זה מקובל כי משתמש AAC יבחן את המכשיר שלו אשר נראה מוזר בתחילה. כאשר תגיב על הבחירות שלהם, אתה מדגיש כי לכל מילה יש משמעות ותוצאות ממשיות בעולם.

זהה הזדמנויות



זהה זמנים במהלך היום, כאשר אדם יכול ללמוד ולתרגל מיומנויות תקשורת. לדוגמה, עזור להם להשתמש ב-TD Snap כדי לתקשר את העדפתם לחטיף או לסרט ברצונם לצפות בו.

הייה סבלני



ללמוד להשתמש ב-תת"ח זה כמו ללמוד כל שפה חדשה. ל מכל אחד להפיק תקשורת משמעותית בשפה חדשה לחלוטין בשבעות הראשונים או אפילו בחודשים של התנסות. רק המשך לשמש מודל, ספק הזדמנויות עם עניין רב לתקשורת והשב לכל בחירה שהם עושים ב-TD Snap.

הייה שותף תקשורת מעולה

זכור להשתמש באסטרטגיות שלהלן כדי להיות שותף תקשורת טוב, וליצור סביבה להצלחת התקשורת.



צור אווירת תקשורת חיובית

זו נוצרת מיחס ואסטרטגיות שמעודדות תקשורת.

■ הנח כי קיימת כשירות

"אני יודע שיש לך דברים להגיד." "אתה יכול לעשות את זה.*"

■ התמקד בשימוש לא בבדיקה

במקום לומר "מצא ספר" אמור "הגיע הזמן לקרוא.. איזה ספר נקרא?"

■ הגב לכל צורות התקשורת

הלומד: מחייך אליך. שותף: "ובכן, שלום גם לך!"

■ המתן

תקשורת תת"ח מצריכה זמן. ספור עד חמש לפני מתן עזרה בחיפוש אוצר מילים. אם משתמש תת"ח מחבר משפט, המתן בסבלנות עד שידבר במקום לקרוא מעבר לכתף, לנחש מה יגיד, או פשוט להמשיך בשיחה.

חפש הצלחות



תקשורת מוצלחת היא יותר מאשר שהאדם מתקשר את מה שאתה מצפה ממנו, ומתי שאתה מצפה לו ואיך שאתה מצפה לזה.

הצלחה יכולה לכלול:

- תשומת לב מוגברת לאינטראקציות
- ייזום תקשורת
- שימוש באוצר מילים רב יותר
- אינטראקציות ארוכות יותר
- הנאה גדולה יותר מאינטראקציות
- עצמאות גדולה יותר בתקשורת

התאם אישית את סט העמוד

לא משנה באיזו סט לוחות תבחר, תרצה להוסיף אוצר מילים מותאם אישית. הקדש זמן לבדיקת סט הלוחות כדי למצוא את המקומות הטובים ביותר להוסיף את אוצר המילים הזה. עיין במקטעים של תא תא והוספת תא, לקבלת עזרה בהוספת חלק מהמידע הבא או כולו:

■ חברים ושמות משפחה ותמונות

■ מידע אישי, אם מתאים לגיל (למשל, כתובת דוא"ל, מספר טלפון)

■ מאכלים ומסעדות אהובים

■ תוכניות טלוויזיה ואמנים מוזיקליים מועדפים

טיפ: השתמש בכלי החיפוש כדי לראות את הפריט באוצר המילים בהגדרת העמוד לפני שתוסיף משהו.

ערוך תא

צפה בסרטון על כפתורי עריכה.
qrco.de/bbA7XP



1 עבור לעמוד עם התא שברצונך לערוך.

2 בחר ערוך.



3 לוח העריכה יופיע בתחתית המסך. שים לב שה"תא" כבר מסומן.



4 בחר את התא שברצונך לערוך.

5 כדי לשנות את סמל התא:



חפש את **תא** החיפוש כדי למצוא סמל..



בחר את כפתור **המצלמה** כדי להוסיף תמונה.




בחר את כפתור **הסמל** כדי לשנות צבעים בסמל הנוכחי.

6 כדי לשנות את הטקסט שמופיע בתא, הקלד בשדה התווית. כדי לשנות את ההודעה המוכנסת או הנאמרת כאשר התא נבחר, הקלד בשדה הודעה.

7 בחר **סגנון** כדי לשנות את צבע התא, הגבול, הגופן או הפריסה.

8 ערוך את הפעולות כדי לשנות את מה שקורה כאשר התא נבחר.

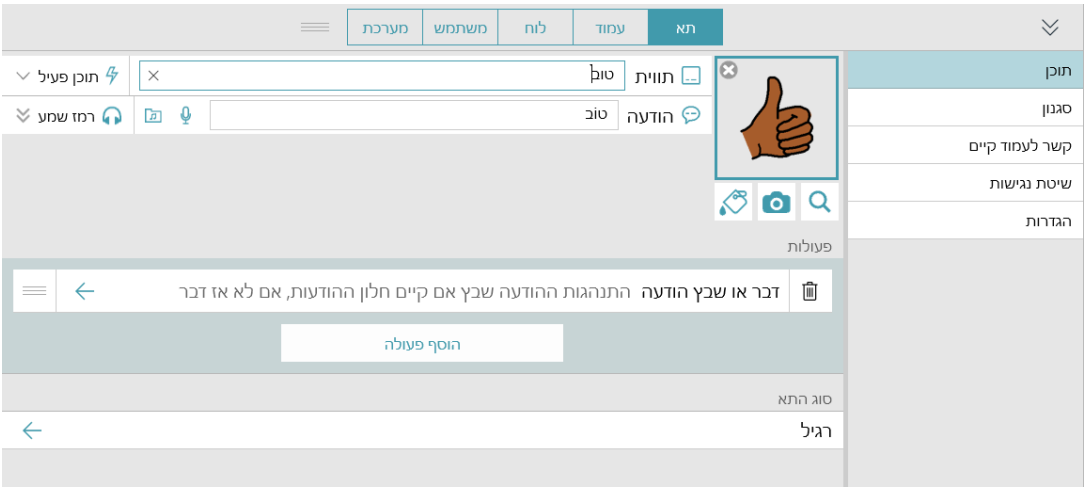

9 בסיום בחר בוצע.


הוספת תא

1 עבור אל את העמוד שבו הנך רוצה להוסיף תא.

2 בחר ערוך.



3 בחר את התא הריק שבו תרצה להוסיף תא.

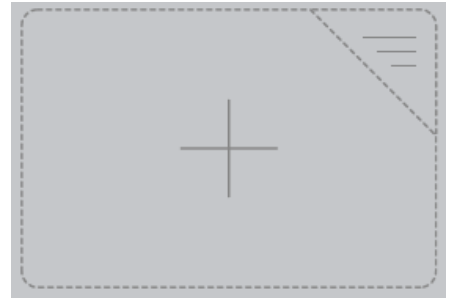

4 הקלד טקסט תווית תא ב- **תווית שדה**.

5 כדי לשנות את סמל התא:

חפש את **תא** החיפוש כדי למצוא סמל.



בחר את כפתור **המצלמה** כדי להוסיף תמונה.



בחר את כפתור **הסמל** כדי לשנות צבעים בסמל הנוכחי.




6 כשתסיים להוסיף לחצנים, בחר **בוצע**.

הערה



הפעולה "דבר או הוסף הודעה" מתוספת אוטומטית לכל הלחצנים החדשים. כדי להוסיף פעולות אחרות, בחר **הוסף פעולה**.

חיפוש מילה

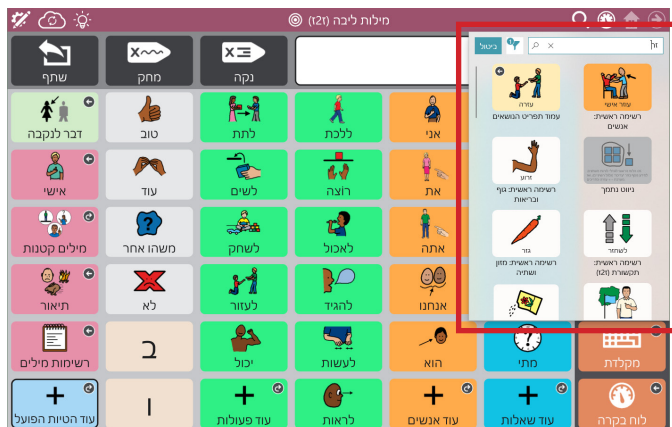

1 בחר את כלי החיפוש.



2 בחר בתיבת הטקסט והקלד את המילה שברצונך למצוא

3 מרשימת האפשרויות, בחר את התוצאה הרצויה.

4 עקוב אחר הנתיב המודגש כדי למצוא את המילה או הביטוי שלך.

צפה בסרטון קצר על אופן השימוש בכלי החיפוש.
qrco.de/bbAAcm



נעל מצב עריכה עם קוד גישה

אם אתה צריך למנוע מהמשתמש לערוך את סט הלוחות, ההגדרות, רכישה בתוך האפליקציה או סנכרון, אתה יכול לדרוש קוד גישה, לצורך הנגישות לתכונות אלה.

1 בחר את תא העריכה.




2 בחר בלשונית מסט.

3 הגדר את מתג השתמש בססמה כדי לעבור למצב מופעל.

4 הזן קוד גישה בן 4 ספרות שרק אתה מכיר ושאינו קל לניחוש.

5 הזן את קוד הגישה שוב כדי לאמת אותו.

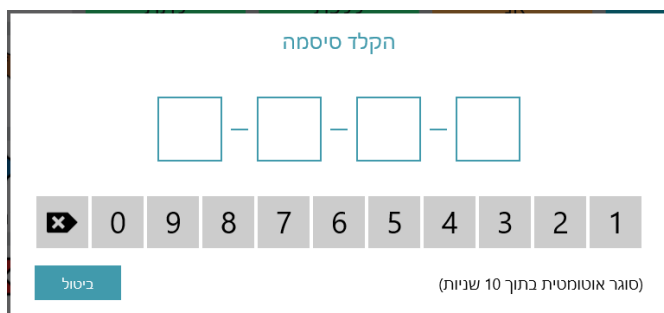

כאשר אתה יוצא ממצב עריכה, קוד הגישה יידרש כדי לבצע רכישות בתוך היישום, ואם הדבר מאופשר, להיכנס למצב עריכה, סנכרון ו/או מצב חיפוש.

עצה



אם שכחת את קוד הגישה שלך, יש קוד גישה ראשי המופיע במדריך למשתמש של TD Snap.

הגייה נכונה

אם אתה מוצא מילה שאינה מבוטאת כהלכה על ידי הקול שבחרת, תוכל להשתמש בחריגת הגייה כדי ללמד את הקול לומר את המילה באופן שתציין.

1 בחר את **תא** העריכה.



2 בחר את **לשונית המשתמש**.

3 בחר **חריגות הגייה**.

4 בחר **הוסף חריגת הגייה**.

תיבת הדו-שיח 'הוסף חריגת הגייה' תיפתח.

5 בשדה מילה הקלד את המילה כפי שהיא כתובה.

6 בשדה הגייה הקלד את המילה באופן פונטי כפי שאתה רוצה שהיא תבוטא. כדי לבדוק את ההגייה בחר את **תא** ההצגה המוקדמת.

7 **בחרבוצע** כדי לשמור את חריגת ההגייה.

הערה



חריגות הגייה מקושרות לקול הפעיל כאשר חריגות ההגייה נוצרו. אם תחליף לקול אחר ואתה רוצה להשתמש באותן חריגות הגייה, עליך לייבא את 'חריגות הגייה' מהקול הקודם. עיין במדריך למשתמש של TD Snap לפרטים.

שמירה ושיתוף הלוחות שלך

סנכרון

הסנכרון מאפשר לך:

- השתמש באותה גרסה של סט הלוחות במספר מכשירים
- שתף את סט הלוחות עם אחרים
- לערוך מרחוק
- שמור את מארז הדפים שלך בענן בלחיצה אחת

בניגוד להעתקה, דפים מסונכרנים מחוברים זה לזה באמצעות גרסה עדכנית בענן.

כשאתה בוחר בסנכרון, אתה שולח שינויים שביצעת לענן ומקבל שינויים שאחרים ביצעו.

כאשר כל המכשירים סונכרנו, לכולם תהיה אותה גרסה של סט העמוד!

למידע נוסף על סנכרון ו-
myTobiiDynavox.co, סרוק את
הקוד הזה:

qrco.de/bbA7YD




זהו תא הסנכרון שלך. הוא
ממוקם בבר העליון של
ה-TD Snap.



שמור קובץ

ה-TD Snap והלוחות שלך יכולים להיות מגובים לקובץ. ניתן לאחסן ולשתף קבצים אלה ב-myTobiiDynavox.com או שתוכל לשמור אותם באופן מקומי במכשיר או ב-USB שלך.

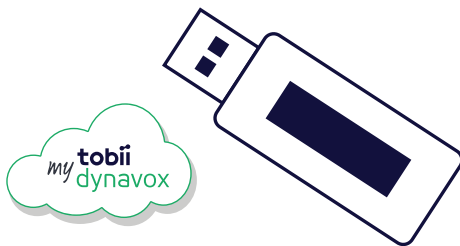

לסנכרון או לשמור לקובץ?



שמירה בקובץ

שמירה בקובץ עדיפה לשיתוף עם אנשים שרוצים לבצע שינויים משלהם, בנפרד ממך, וכאשר אתה רק רוצה לשמור או לשתף כמה לוחות, לא סט לוחות שלם.

שמירה בקובץ נהדרת לזמנים שבהם אין לך חיבור לאינטרנט. צור קובץ גיבוי לעצמך, או העבר את הקובץ ל-USB כדי לשתפו עם מישהו אחר.

שמירה בקובץ היא הדרך היחידה לגבות משתמש, כולל כל ההגדרות שלו.

סנכרון

סנכרון הוא שימושי ביותר כאשר המשתמש עובר בין מספר מכשירים. אולי יש להם מכשיר בבית הספר עוד מכשיר בבית. סנכרון את סט הלוחות בין שני המכשירים כדי להבטיח עקביות.

ניתן להשתמש בסנכרון גם לעריכה מרחוק, מבלי להפריע למשתמש. לדוגמה, המשתמש יכול להמשיך להשתמש במכשיר התקשורת שלו בזמן שאתה עורך את סט הלוחות במחשב שלך. סנכרון במחשב האישי ולאחר מכן סנכרון בהתקן התקשורת כדי לקבל את השינויים.

סנכרון יכול לשמש גם כשיטת גיבוי נוחה למכשיר בודד. בכל פעם שאתה מסנכרן, אתה יוצר גיבוי לענן.

הצעדים הבאים

למד והתאמן עם מארז הלוחות שלך

כל סט לוחות TD Snap מאורגן בצורה שונה ויש לו תכונות שונות. יצרנו כרטיסי הדרכה עבור כל סט לוחות. הם מסבירים את התכונות הייחודיות של סט הלוחות שלך ועוזרים לך ללמוד מעשי באמצעות פעילויות לדוגמה. פשוט סרוק את קוד ה-QR המתאים למטה.

כרטיסיות סט לוחות הדרכה נוספות
של TD Snap Core First

qrco.de/iiscftc



שאלות נפוצות

כיצד אוכל להחליט באיזו סט לוחות להשתמש?

סט הלוחות הנכונה עבור כל משתמש נקבעת על ידי מספר גורמים, כולל צרכי גישה, רמת אוריינות, צרכי הסמלים והעדפות, סגנון רכישת שפה (אנליטי לעומת גשטאלט), אבחון קליני (אפזיה וכו') והשפה/שפות שלהם. ההדרכה הטובה ביותר מגיעה מהקלינאי המפנה שלך, או מהיועץ המקומי לפתרונות Tobii Dynavox. הם יבחנו את הפרופיל והצרכים הייחודיים של כל משתמש ויגישו המלצה. בקר TobiiDynavox.com ובחר איש קשר כדי למצוא את יועץ הפתרונות המקומי שלך, או שותף Tobii Dynavox.

האם אני יכול לנסות ערכות לוחות שונות?

כן! אתה יכול לבחור סט לוחות אחרת בכל עת.

לך ל ערוך < סט לוחות > [בחר את סט הלוחות הנוכחית] < סט לוחות חדשה.

נסה עם ערכות לוחות שונות בתחילת הדרך שלך אם תרצה. עם זאת, ברגע שהמשתמש מתחיל להכיר את עצמו ולהצליח עם סט מסוים של לוחות, עדיף להישאר עם זה.

מה אם המשתמש מתקשה לבצע את הבירה בצורה מדויקת?

ישנן מספר דרכים לעזור למשתמש לבצע בחירה במהירות ובדייקנות. כל דבר, החל משינוי שיטת הגישה להתאמת ההגדרות ועד בחירת גודל שונה של הרשת או פשוט מיקום מחדש של המכשיר יכול לפתור בעיות גישה. אנחנו יכולים לעזור! פנה תמיד קודם כל לקלינאי המקומי שלך, ליועץ הפתרונות או לשותף של Tobii Dynavox. אחרת, התקשר או שלח דוא"ל לתמיכה של Tobii Dynavox.

סרוק את הקוד הזה כדי לצפות
בסרטון על שיטות גישה במכשירי
היי-טק.

qrco.de/bbA7US



mytobii dynavox



חשבון החינם שלך של myTobiiDynavox.com מאפשר לך גישה אל מספר הטבות, כולל אחסון בענן לצורך גיבויים, סנכרון הגדרת לוחות ושיתוף, מערכי שיעור ועוד!

myTobiiDynavox

myTobiiDynavox.com



הצטרפות ל-myTobiiDynavox תאפשר לך לעשות את הדברים הבאים:

- לגבות בבטחה את המערכת שלך
- להוריד כלים חינוכיים ומשאבים
- לצפות במערכי שיעור חינוכיים של Core First
- ללמוד על עדכונים זמינים
- לגשת לתמיכה טכנית ולשאלות נפוצות
- לשתף סט לוחות וחבילות דפים

קהילת פייסבוק של TD

qrco.de/SnapFBHE



מרכז למידה של Tobii Dynavox

learn.tobiidynavox.com



דגש טכנולוגיה מסייעת

03.7313276



עמוד התמיכה של TD Snap

qrco.de/SnapHelp

