

**tobii**dynavox

Gruppo di pagine TD Snap® Core First

# Schede di formazione



# Indice

- 1 Domande frequenti
- 2 Glossario di TD Snap® Core First
- 4 Proviamolo!
- 6 Attività: Leggere un libro
- 6 Attività: Fare una partita
- 7 Attività: Guardare lo sport
- 7 Attività: Andare al ristorante
- 8 Come utilizzare l'Assistente Google con TD Snap®
- 10 Modifica dei supporti visivi
- 11 Modifica delle dimensioni della griglia
- 12 Supporto aggiuntivo

# Domande frequenti

## **Cos'è Core First?**

Core First è una raccolta di strumenti di comunicazione che consentono alle persone di comunicare in modo efficace e preciso. Il gruppo di pagine cresce con l'utente e può essere personalizzato facilmente. È basato su parole principali, un piccolo gruppo di parole flessibili che costituiscono circa l'80% di tutte quelle che utilizziamo in molte situazioni quotidiane.

## **Qual è lo scopo di tutti i diversi strumenti?**

Gli strumenti di Core First lavorano insieme per favorire il coinvolgimento (con Argomenti, Supporti e Collegamenti rapidi), la letto-scrittura (Parole principali, Elenchi di parole e Tastiera) e la crescita (varie dimensioni griglia).

## **Qual è il beneficio di avere supporti visivi?**

I supporti visivi aiutano gli individui a conoscere cosa sta accadendo durante un'attività, a comprendere le aspettative e ad auto-regolarsi. I Supporti in Core First includono: Prima-Dopo, Mini programma, Storie sociali, Testi e Timer visivo. È possibile trovare i supporti visivi su ciascuna pagina Argomenti.

## **Come funziona il supporto negli Argomenti?**

Gli Argomenti supportano le interazioni e la comunicazione in ambienti specifici o su temi particolari. Si tratta principalmente di messaggi basati su frasi che consentono a un individuo di comunicare in modo rapido ed efficace. Consigliamo di personalizzare gli Argomenti con messaggi significativi per l'individuo, in modo da sortire il massimo effetto.

Gli Argomenti consentono agli individui di interagire nelle conversazioni più significative e mostrano cosa conoscono anche più di ciò che le abilità linguistiche e di letto-scrittura correnti possano consentire.

## **Come funziona la barra degli strumenti?**

La barra degli strumenti consente di accedere a tutti i vari strumenti di comunicazione che potrebbero essere necessari in ogni pagina. È possibile nascondere o aggiungere pulsanti alla barra degli strumenti.


## **Come posso ampliare il vocabolario?**

In Core First ci sono due metodi differenti per ampliare il vocabolario. Un modo è quello di aumentare la dimensione della griglia. Il vocabolario rimane, relativamente, nella stessa posizione, tuttavia potrebbe essere necessario apportare alcune modifiche. Un altro modo per ampliare il vocabolario è iniziare su una dimensione della griglia più grande rispetto a quella che si pensi sia necessaria e nascondere i pulsanti. Man mano che un individuo diventa più esperto, è possibile scoprire i pulsanti per ampliare il relativo vocabolario.

# Glossario di TD Snap® Core First


## Parole principali

Un piccolo gruppo di parole usate frequentemente che è possibile combinare per creare messaggi esclusivi.

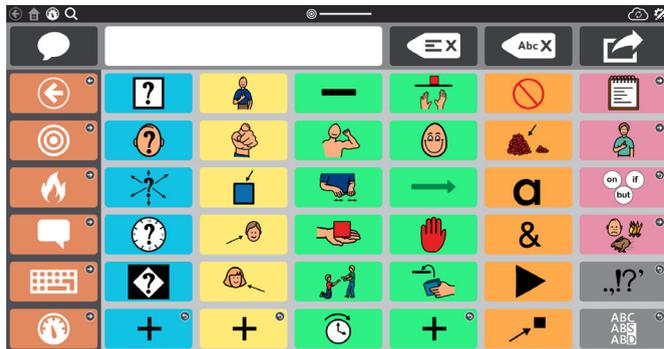

## Messaggi veloci

Piccole parole e frasi che vengono utilizzate negli ambienti di tutti i giorni per mantenere viva la conversazione, attirare l'attenzione o commentare.

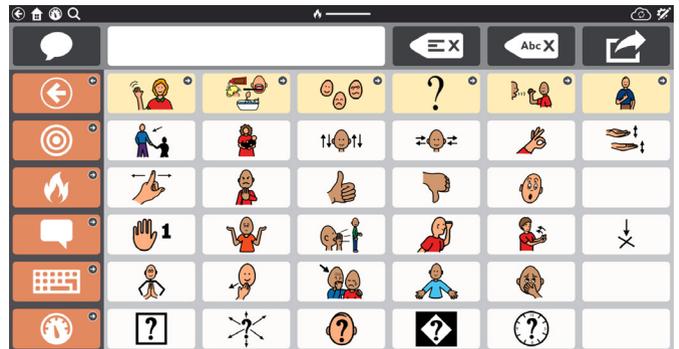

## Argomenti

Messaggi pre-memorizzati, organizzati a scopo comunicativo, correlati a un contesto o a un ambiente specifico.



## Barra degli strumenti

La Barra degli strumenti è il luogo dove si trovano tutti gli strumenti di comunicazione. Si trovano qui le Parole Principali, i Messaggi veloci, ecc.



## Elenchi di parole e Parole argomento

Gli Elenchi di parole sono organizzati per categoria (ad esempio, cibo, animali, ecc.). Le Parole argomento sono organizzate per categoria e correlate a un argomento in particolare.





### Supporti

Supporti presenti in ogni Argomento. Aiutano gli utenti tramite le routine di auto-regolazione rendendo le aspettative più concrete, permanenti e chiare.


### Prima...Dopo

Mostra a un utente cosa accadrà prima e, successivamente, cosa avverrà poi.




### Mini programma

Mostra l'ordine di un piccolo gruppo di attività.

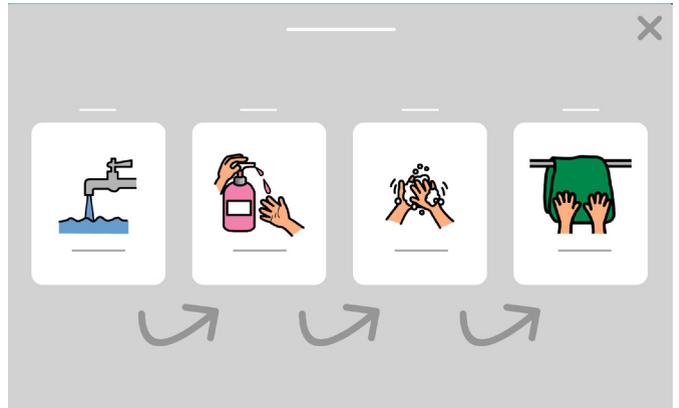


### Storie sociali (Testo)

Storie che descrivono una situazione e confermano come un individuo può sentirsi e gestire tale situazione in modo positivo.

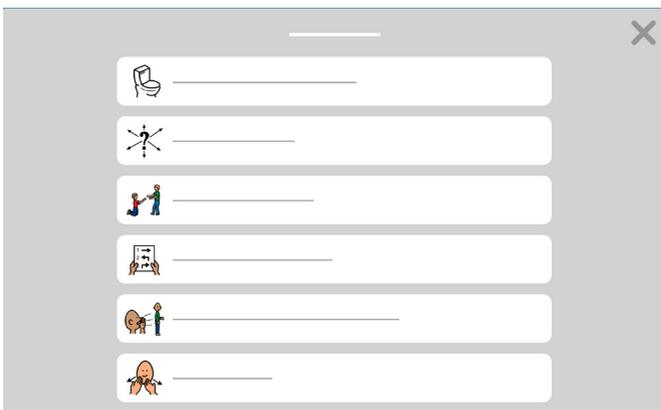

### Timer visivo

Mostra il tempo residuo di un'attività.

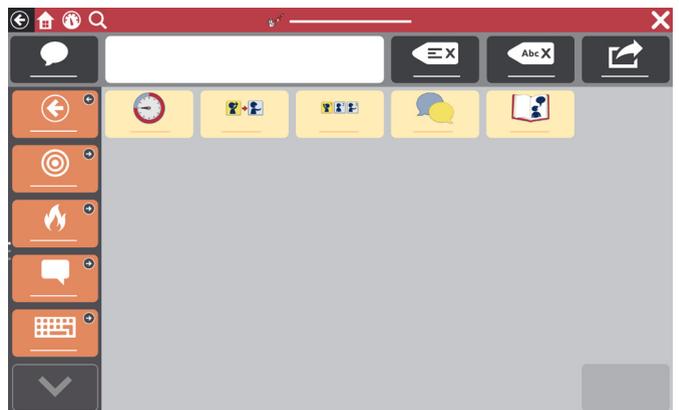

### Pannello di controllo

Il Pannello di controllo contiene comandi del dispositivo, come quello del volume e dei telecomandi. Puoi accedervi dalla barra degli strumenti.



### Strumento di modifica

Apporta modifiche al contenuto o alle impostazioni.

# Proviamolo!



Nelle pagine seguenti troverai alcune attività per iniziare. Scegli le attività più motivanti e più coinvolgenti. Sentiti libero di ripetere le attività dal momento che la ripetizione supporta l'apprendimento. Ricordati di utilizzare le strategie indicate di seguito per poter essere un buon partner di comunicazione e creare un ambiente ottimale per la comunicazione.



## **Riconosci le opportunità**

Identifica i momenti della giornata in cui una persona può apprendere e mettere in pratica le abilità di comunicazione. Puoi, ad esempio, aiutarla a usare TD Snap® per comunicare la scelta di mangiare uno snack o guardare un film.



## **Crea un ambiente di comunicazione positivo**

Adotta queste attitudini e strategie che incoraggiano la comunicazione.

### ■ **Presumi competenza**

"So che puoi farlo."

### ■ **Concentrati sull'uso e non sulla verifica**

Invece di dire "Trova libro", pronuncia: "È l'ora della lettura. Quale libro dobbiamo leggere?"

### ■ **Rispondi a tutte le modalità di comunicazione**

Allievo: Ti sorride. Partner: "Ciao a te!"

### ■ **Attendi**

Sarebbe auspicabile contare fino a cinque prima di aiutare l'utente a individuare il vocabolario.



### Uso della modellazione CAA

La modellazione si è dimostrata il metodo migliore per insegnare alle persone a comunicare tramite CAA. Richiede di toccare e utilizzare il dispositivo mentre parli e interagisci con la persona.

- La modellazione ha lo scopo di mostrare all'utente come comunicare.
- Non richiede imitazione.
- Modella le parole chiave invece di ogni parola pronunciata.
- Insegna tramite la ricerca dei vocaboli.
- È ammissibile commettere errori. Ti offrono la possibilità di modellare come correggerli.
- La modellazione non riguarda interrogazioni o test.



Guarda un video che dimostra la modellazione.

[qrco.de/bbA7Ur](https://qrco.de/bbA7Ur)



### Cerca i progressi

I progressi nella comunicazione valgono più della semplice comunicazione da parte di un utente di ciò che ti aspetti, quando e come te lo aspetti.

#### I progressi possono includere:

- Maggiore attenzione alle interazioni
- Avviamento della comunicazione
- Utilizzo di un vocabolario più ampio
- Interazioni più lunghe
- Maggiore coinvolgimento nelle interazioni
- Maggiore indipendenza nella comunicazione

### Non commettere questi errori da principiante!

- Non è necessario creare qualcosa dal nulla. Abbiamo già realizzato noi la struttura! Familiarizza con il contenuto di TD Snap® Core First e successivamente personalizzalo per l'utente.
- Non metterti troppa pressione, né metterla all'utente.
- Non è realistico pensare di poter completare ogni attività con precisione all'inizio. È comprensibile fare errori.



# Attività: Leggere un libro



## Materiali

- Argomento lettura di TD Snap® Core First
- Uno tra i libri preferiti

## Preparazione

Seleziona Argomenti nella Barra degli strumenti. Individua l'Argomento lettura e analizza il vocabolario prima di iniziare l'attività.

## Passaggi

- 1 Presenta il libro e mostra la copertina. Discuti dell'argomento del libro.
- 2 Leggi ogni pagina con una pausa finale per favorire opportunità di comunicazione.
- 3 Durante la lettura, fai delle pause per lasciare spazio ai commenti e poni domande (ad esempio, Cosa ne pensi finora? Fa paura?).
- 4 Al termine della lettura, non interrogare ma domanda come si sente o la sua opinione sulla storia.




## Suggerimenti utili

- Se c'è una frase ripetitiva nella storia e hai un pulsante vuoto sulla pagina, inserisci la frase sul pulsante.
- Seleziona il pulsante ogni volta che compare la frase ripetuta.
- Messaggi come "Gira la pagina" e "Leggi di nuovo" sono già inseriti nel tuo dispositivo.
- Commenta ogni cosa che il bambino osserva e/o punta nell'ambiente. Al termine, sottolinea il modo eccellente con cui ha comunicato con te.
- Analizza nuovamente il libro, concentrandoti sulle immagini. Nota le parole nel dispositivo corrispondenti alle immagini e selezionalo.



# Attività: Fare una partita

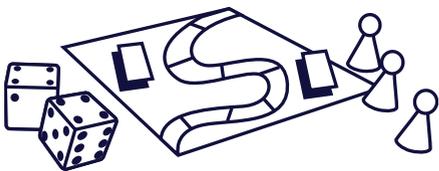

## Materiali

- Argomento giochi di TD Snap® Core First
- Uno tra i giochi da tavolo o giochi di carte preferiti

## Idee di gioco

Go Fish, War, Bingo, Memory, Candyland

## Preparazione

Seleziona Argomenti nella Barra degli strumenti. Individua l'Argomento giochi e analizza il vocabolario prima di iniziare l'attività.

## Passaggi

- 1 Presenta il gioco ed esamina le regole se non ci hai mai giocato prima d'ora.
- 2 Inizia a giocare utilizzando il vocabolario esaminato.
- 3 Fai pause per commentare l'andamento del gioco.
- 4 Al termine del gioco, prenditi il tempo necessario per i commenti.




## Suggerimenti utili

- Controlla la cartella Parole per gioco sotto Parole per argomento al fine di ampliare il vocabolario.
- Messaggi come "È il mio turno", "Gioca ancora" e "Non mi piace questo gioco" sono già inseriti nel tuo dispositivo.
- Fai tenere traccia all'utente del turno di ciascuno (il mio turno, il tuo turno) selezionando i pulsanti appropriati.



# Attività: Guardare lo sport

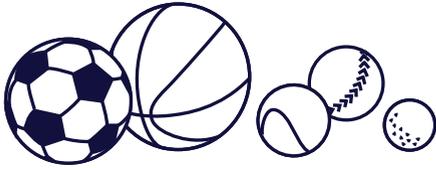

## Materiali

- Argomento sport di TD Snap® Core First
- Uno tra gli eventi sportivi preferiti

## Preparazione

Seleziona Argomenti nella Barra degli strumenti. Individua l'Argomento sport e analizza il vocabolario prima di iniziare l'attività.



## Passaggi


- 1 Presenta l'evento sportivo che stai guardando ed esamina le squadre in campo.
- 2 Dimostra come navigare e attivare i pulsanti per fare commenti divertenti durante il gioco.
- 3 Al termine dell'attività, analizza eventuali tentativi di comunicazione di successo (ad esempio, "Mi è davvero piaciuto il modo in cui hai puntato la palla per mostrarmi che ti interessava.").

## Suggerimenti utili

- Usa il pulsante Modifica per aggiungere la tua squadra preferita al pulsante che dice "Squadra preferita [ ]".
- Messaggi come "C'è qualche partita oggi?", "Amo questa squadra" e "Fanno schifo" sono già inseriti nel tuo dispositivo.
- Se hai a disposizione un pulsante vuoto, inserisci un'acclamazione divertente per la tua squadra.



# Attività: Andare al ristorante

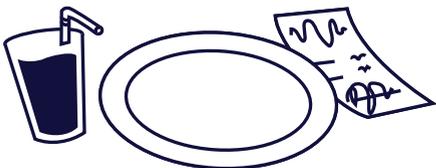

## Materiali

- Argomento ristorante di TD Snap® Core First
- Uno dei ristoranti preferiti

## Preparazione

Seleziona Argomenti nella Barra degli strumenti. Individua l'Argomento ristorante e analizza il vocabolario prima di iniziare l'attività.



## Passaggi

- 1 Discuti della decisione di andare al ristorante.
- 2 Puoi iniziare a creare il vocabolario prima ancora di raggiungere il ristorante. Ad esempio, seleziona il pulsante "Usciamo per cena".
- 3 Una volta al ristorante, modella con il dispositivo durante il pasto.
- 4 Al termine del pasto, analizza eventuali tentativi di comunicazione di successo. (Ad esempio "Quando hai premuto "altro" sapevo di dover passare il pane!").

## Suggerimenti utili

- Messaggi come "Possiamo mangiare fuori" e "Adoro questo posto" sono già programmati nel dispositivo.
- Incoraggia ciascuno al tavolo a lasciarsi coinvolgere, inclusi i camerieri.



# Come utilizzare l'Assistente Google con TD Snap®

Le pagine dell'Assistente Google disponibili in TD Snap® sono organizzate per funzione. I pulsanti su queste pagine consentono di gestire le attività quotidiane, riprodurre musica, fare domande e controllare la casa tramite l'Assistente Google.

## Come trovare le pagine dell'Assistente Google in TD Snap®:

1 Seleziona **Dashboard** nella Barra degli strumenti.



2 Seleziona **Assistente Google**.



## Le icone indicano l'apparecchiatura necessaria per utilizzare tale pulsante.



Non è richiesto hardware aggiuntivo.



Dispositivo Google Nest Mini e altoparlante abilitato per l'Assistente Google richiesti.



Presi, lampadina e/o termostato smart richiesti.

## Suggerimenti per un utilizzo ottimale:

- La riproduzione di musica a un volume molto alto potrebbe disattivare la musica o rendere difficoltoso qualche comando.
- Se non si ottiene la risposta prevista quando si invia un comando Google, provare a utilizzare parole differenti o più specifiche.  
*Esempio: Se "Ok Google, accendi la luce" non funziona, provare con "Ok Google, accendi la luce in soggiorno."*
- Ricordare che, quando si utilizza un altoparlante Google esterno, è necessario pronunciare "Ok Google" prima del comando.
- Assicurarsi di avere un modo per chiedere aiuto e un sistema di backup per le funzioni di domotica.
- I giochi funzionano meglio quando non richiedono risposte specifiche e consentono tempi lunghi di risposta.

## Domande comuni per l'Assistente Google

### Ho bisogno dell'app Google Home?

Sì, devi scaricare l'app Google Home sul telefono o su tablet se hai acquistato apparecchiature aggiuntive (ad es., Google Nest Mini, connettori smart, ecc.).

### Ho bisogno di un account Google?

Sì, per utilizzare l'Assistente Google hai bisogno di un account Google gratuito. Devi collegare il tuo account Google a TD Snap® (*Modifica > Utente > Collega a Google*).

### Posso ascoltare la musica?

Sì, devi utilizzare un altoparlante esterno Google (ad es. Google Nest Mini, Google Home Nest, ecc.) e assicurarti che sia possibile ancora sentire il dispositivo sulla musica.

### Posso controllare le luci di casa?

Sì, con l'apparecchiatura giusta puoi controllare le luci di casa.

### Ho un apparecchio smart a casa. Posso controllarlo con l'Assistente Google?

Sì. Per le informazioni dettagliate, consulta la guida in dotazione con l'apparecchio smart.

### Posso utilizzare l'Assistente Google per le chiamate di emergenza?

No. L'Assistente Google NON è in grado di chiamare i servizi di emergenza.

### Come posso ottenere assistenza?

Per problemi con il software TD Snap®, rivolgiti all'assistenza tecnica Tobii Dynavox.

Per problemi con l'apparecchiatura smart, visita il sito web del produttore.

## Risoluzione dei problemi dell'assistenza Google

[qrco.de/GoogleAssistantExplore](https://qrco.de/GoogleAssistantExplore)

[qrco.de/GoogleAssistantHelp](https://qrco.de/GoogleAssistantHelp)

[qrco.de/GoogleNestHelp](https://qrco.de/GoogleNestHelp)




Leggi la guida completa dell'Assistente Google per TD Snap®.

[qrco.de/gatdsa](https://qrco.de/gatdsa)

# Modifica dei supporti visivi


- 1 Trova la pagina Supporti contenente il supporto visivo da modificare.

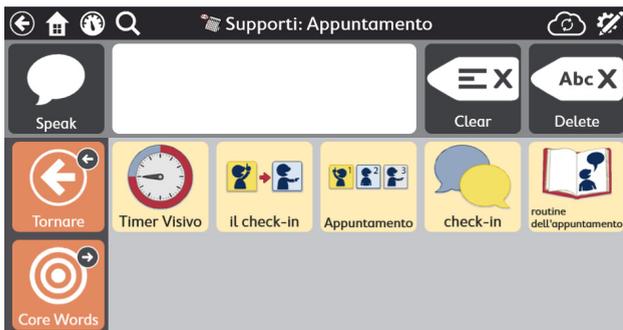

- 2 Seleziona **Modifica**.



- 3 Seleziona il pulsante del supporto da modificare.

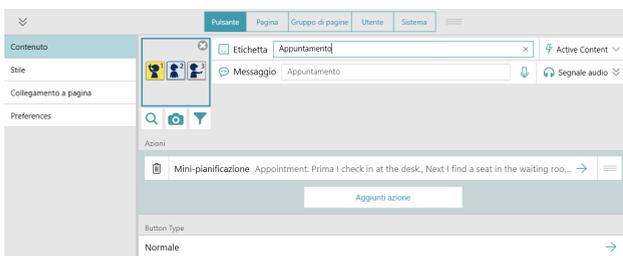

- 4 Seleziona l'azione (Mini programma, Timer visivo, Prima Dopo o Testi).

- 5 Seleziona l'icona della matita in qualsiasi riga per apportare modifiche.



- 6 Seleziona il pulsante Anteprima in fondo al pannello Modifica del supporto per vedere l'anteprima delle modifiche apportate al Supporto comportamentale.

- 7 Al termine, seleziona **Fatto**.

# Modifica delle dimensioni della griglia

Consigliamo di attribuire priorità alla capacità dell'utente di selezionare i pulsanti accuratamente. L'accesso fisico al dispositivo di comunicazione richiede pratica. Inizia con una griglia di dimensioni minori. Mano a mano che l'utente si abitua a utilizzare il dispositivo, sarà in grado di passare a griglie di dimensioni maggiori. Cambiare le dimensioni della griglia è semplice e il Gruppo di pagine TD Snap® Core First è progettato per mantenere l'ubicazione del vocabolario coerente tra le griglie.

- 1 Seleziona il pulsante **Modifica**.



- 2 Seleziona la scheda **Gruppo di pagine**.



- 3 Seleziona **Dimensioni griglia**.



- 4 Scegli da Dimensioni griglia ottimizzate.

- 5 Seleziona **Fine**.



Scansiona questo codice per vedere un breve video sulla modifica delle dimensioni della griglia.

(In inglese)

[qrco.de/bbA7X9](https://qrco.de/bbA7X9)

# Supporto aggiuntivo



**Pagina di supporto TD Snap®**

[qrco.de/SnapHelp](https://qrco.de/SnapHelp)



**Community TD di Facebook**

[qrco.de/TDFB](https://qrco.de/TDFB)



**Supporto tecnico**

Per assistenza tecnica, rivolgersi al rappresentante Tobii Dynavox locale.

**Impara come modificare i pulsanti, eseguire un backup, condividere i Gruppi di pagine e utilizzare altre funzioni di TD Snap®:**



**Schede di formazione di base TD Snap®**

[qrco.de/bdmMzq](https://qrco.de/bdmMzq)



**Manuale utente TD Snap®**

[qrco.de/tdsumIT](https://qrco.de/tdsumIT)



**Hub di apprendimento Tobii Dynavox (solo lingua inglese)**

[learn.tobiidynavox.com](https://learn.tobiidynavox.com)