

tobiidynavox

Conjunto de páginas do TD Snap® Core First

Cartões de treinamento



Índice

- 1 Perguntas frequentes
- 2 Glossário do TD Snap[®] Core First
- 4 Vamos usar!
- 6 Atividade: Ler um livro
- 6 Atividade: Jogar um jogo
- 7 Atividade: Assistir a esportes
- 7 Atividade: Ir a um restaurante
- 8 Como usar o Google Assistente com o TD Snap[®]
- 10 Editar Suportes visuais
- 11 Alterar tamanhos da grade
- 12 Suporte adicional

Perguntas frequentes

O que é o Core First?

O Core First é uma coleção de ferramentas de comunicação que permitem que os indivíduos se comuniquem de maneira eficiente e precisa. O conjunto de páginas cresce com o usuário e pode ser facilmente personalizado. É baseado em palavras centrais, um pequeno conjunto de palavras flexíveis que compõem cerca de 80% do que todos nós usamos em muitas situações diárias.

Qual é o propósito de todas as diferentes ferramentas?

As ferramentas do Core First trabalham juntas para apoiar o engajamento (com Temas, Suportes e Respostas rápidas), Alfabetização (Núcleo, Listas de Palavras e Teclado) e Crescimento (vários tamanhos de grade).

Qual é a vantagem de ter suportes visuais?

Os suportes visuais ajudam os indivíduos a saber o que está acontecendo durante uma atividade, entender as expectativas e se autorregular. Os suportes no Core First incluem: Primeiro...então, Minicronograma, História social, Scripts e Temporizador visual. Os suportes visuais podem ser encontrados na página de cada Tema.

Como funcionam os Temas?

Os temas apoiam interações em ambientes específicos ou em torno de temas específicos. Esses são principalmente mensagens baseadas em frases que permitem que um indivíduo se comunique de forma rápida e eficiente. Recomendamos personalizar os Temas com mensagens que sejam significativas para o indivíduo para que sejam mais eficazes.

Os temas permitem que os indivíduos se envolvam em conversas significativas e mostrem o que sabem ainda mais do que suas habilidades atuais de linguagem e alfabetização podem permitir.

Como funciona a Barra de ferramentas?

A barra de ferramentas permite o acesso a todas as várias ferramentas de comunicação que podem ser necessárias em cada página. Você pode ocultar ou adicionar botões à barra de ferramentas.


Como posso aumentar o vocabulário?

Existem dois métodos diferentes para aumentar o vocabulário no Core First. Uma maneira é aumentar o tamanho da grade. O vocabulário permanece relativamente na mesma posição, mas você pode precisar fazer alguns ajustes. Outra maneira de aumentar o vocabulário é começar com um tamanho de grade maior do que você acha necessário e ocultar os botões. À medida que o indivíduo se torna mais proficiente, você pode exibir os botões para aumentar o vocabulário.

Glossário do TD Snap® Core First


Palavras Básicas

Um pequeno conjunto de palavras usadas com frequência que podem ser combinadas para criar mensagens únicas.

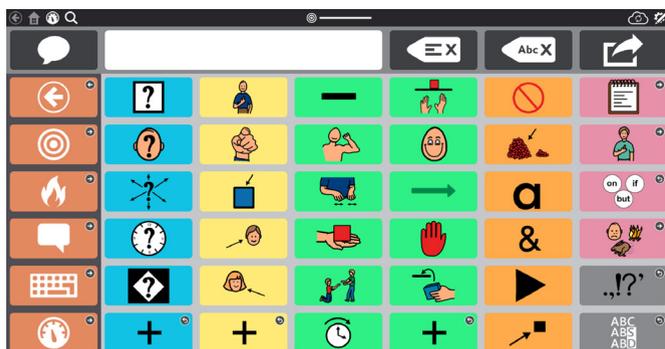

Respostas rápidas

Pequenas palavras e frases que são usadas em ambientes cotidianos para manter a conversa, chamar a atenção ou comentar.

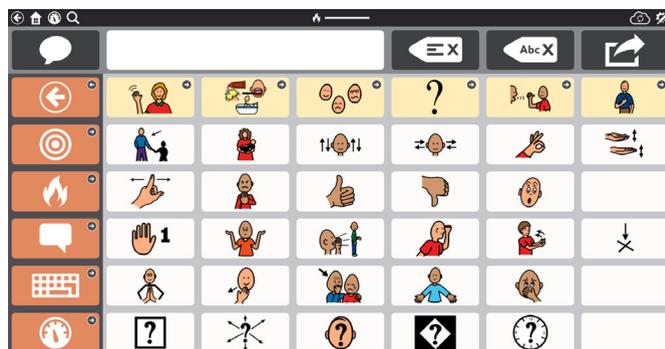


Temas

Mensagens pré-armazenadas, organizadas por intenção comunicativa, relacionadas a uma situação ou ambiente específico.



Barra de ferramentas

A Barra de Ferramentas é onde todas as ferramentas de comunicação estão localizadas. Encontre ferramentas como Core, Temas e Respostas Rápidas aqui.

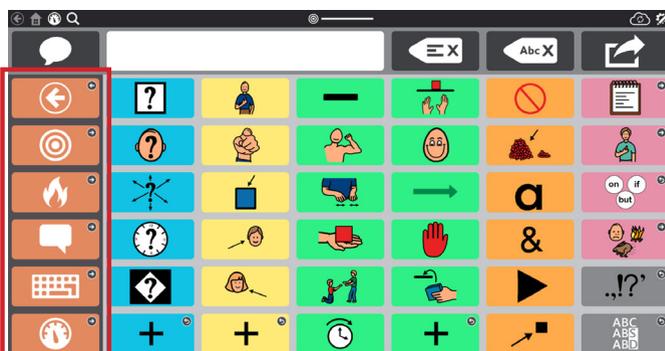

Listas de palavras e palavras curtas

Listas de palavras são organizadas por categoria (por exemplo, comida, animais de estimação, etc). Palavras curtas são organizadas por categoria e relacionadas a um tema específico.





Suportes

Suportes são encontrados em cada tema. Eles ajudam os indivíduos na autorregulação, tornando as expectativas mais concretas, permanentes e claras.


Primeiro... então

Mostra claramente ao indivíduo o que acontecerá primeiro e depois o que acontecerá em seguida.




Minicronograma

Mostra a ordem de um pequeno conjunto de atividades.

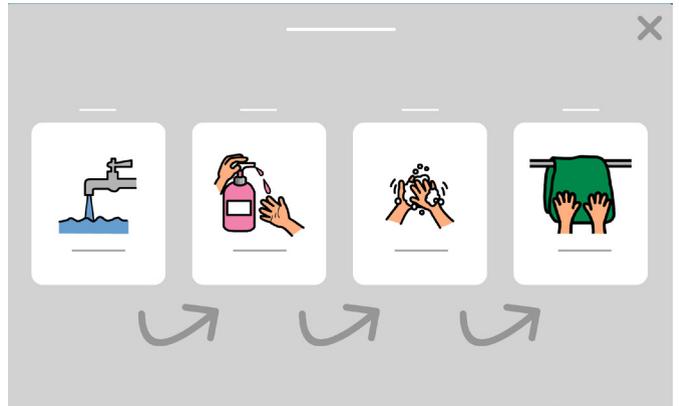


Narrativa social (Script)

São histórias que descrevem uma situação e reconhecem como um indivíduo pode se sentir e gerenciar isso de maneiras positivas.

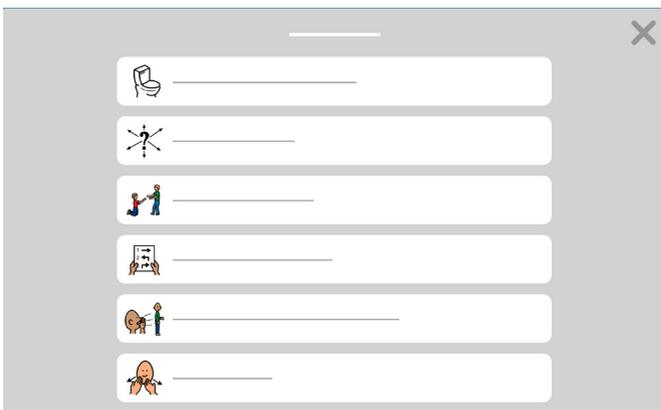

Temporizador visual

Mostra quanto tempo resta em uma atividade.

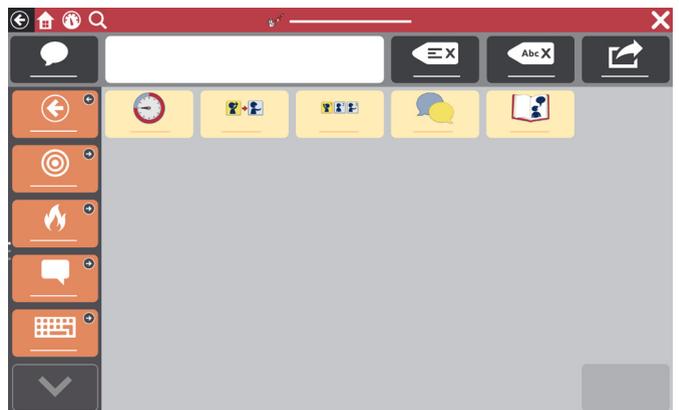

Painel de controle

O painel contém controles de dispositivos, como volume e controles remotos. Você pode acessá-lo na barra de ferramentas.



Ferramentas de edição

Faz alterações ao conteúdo ou configurações.

Vamos usar!



Nas páginas a seguir, você encontrará algumas atividades para começar. Escolha atividades que sejam motivadoras e permaneçam envolventes. Sinta-se à vontade para repetir atividades, uma vez que a repetição apoia o aprendizado. Lembre-se de usar as estratégias abaixo para ser um bom parceiro de comunicação e criar um ambiente para o sucesso da comunicação.



Reconheça oportunidades

Identifique os momentos nos quais o indivíduo consegue aprender e praticar habilidades de comunicação ao longo do dia. Por exemplo, ajude-o a usar o TD Snap® para comunicar as escolhas dele sobre um lanche ou um filme.



Crie um ambiente positivo para comunicação

Adote essas atitudes e estratégias que estimulam a comunicação.

■ **Assuma competência**

"Eu sei que você consegue fazer isso."

■ **Concentre-se no uso, não no teste**

Em vez de dizer "Encontre o livro". Diga "É hora da leitura. Qual livro devemos ler?"

■ **Responda a todas as formas de comunicação**

Aprendiz: Sorri para você. Parceiro: "Bem, olá para você também!"

■ **Espere**

O parceiro conta até cinco antes de oferecer ajuda para localizar o vocabulário.



Uso de Modelo CAA

A modelagem tem provado ser a melhor maneira de ensinar as pessoas a se comunicarem usando a CAA. A modelagem envolve tocar e usar o dispositivo enquanto você fala e interage com a pessoa.

- Modelagem é mostrar ao indivíduo como se comunicar.
- Não é necessário imitação.
- Modele palavras-chave em vez de cada palavra dita.
- Modele à medida em que busca por vocabulário.
- Não há problema em cometer erros. Eles oferecem a chance de modelar como corrigi-los.
- Modelagem não é questionar ou testar.



Assista ao vídeo com a demonstração da modelagem.

qrco.de/bbGQul



Busque o sucesso

O sucesso da comunicação é mais do que o indivíduo comunicar o que você espera, quando espera e como o espera.

O sucesso pode incluir:

- Maior atenção às interações
- Iniciação da comunicação
- Uso de mais vocabulário
- Interações mais longas
- Maior aproveitamento das interações
- Mais independência na comunicação

Não cometa esses erros de principiante!

- Você não precisa criar algo do zero. Construímos a estrutura. Familiarize-se com o que há no TD Snap® Core First e depois personalize para o usuário.
- Não coloque muita pressão sobre você ou o usuário.
- Completar todas as tarefas com precisão no início não é realista. Não há problema em cometer erros.



Atividade: Ler um livro



Materiais

- Tema de leitura do TD Snap® Core First
- Um livro favorito

Preparação

Selecione Temas na barra de ferramentas. Localize o Tema de Leitura e revise o vocabulário antes de iniciar a atividade.



Etapas


- 1 Apresente o livro e mostre a capa. Discuta sobre o que será o livro.
- 2 Leia cada página e faça uma pausa ao final para permitir oportunidades de comunicação.
- 3 Ao ler, faça uma pausa para fazer comentários e perguntas (por exemplo, o que você acha até agora? É assustador? Eu acho que o garoto estava assustado.)
- 4 Depois de terminar de ler o livro, não questione, em vez disso, pergunte como eles se sentiram ou o que acharam da história.

Dicas úteis

- Se houver uma frase repetitiva na história e você tiver um botão vazio na página, programe a frase no botão.
- Selecione o botão sempre que a frase repetida aparecer.
- Mensagens como "Vire a página" e "Leia novamente" já estão programadas no seu dispositivo.
- Comente tudo o que a criança olha e/ou aponta para o ambiente. Quando terminar, reforce o quanto eles se comunicavam com você.
- Revise o livro novamente, concentrando-se nas imagens. Observe as palavras no dispositivo que correspondem às imagens e ao modelo, selecionando-as.



Atividade: Jogar um jogo

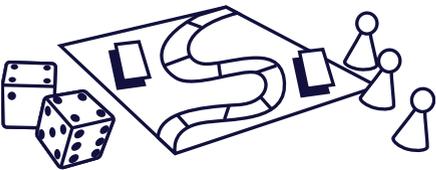

Materiais

- Tema de jogos do TD Snap® Core First
- Um jogo de tabuleiro ou de cartas favorito

Ideias de jogo

Vá Pescar, War, Bingo, Memória, Candyland

Preparação

Selecione Temas na barra de ferramentas. Localize o Tema de Jogos e revise o vocabulário antes de começar a atividade.



Etapas


- 1 Apresente o jogo e repasse as regras se você não o jogou antes.
- 2 Comece a jogar usando o vocabulário que você revisou.
- 3 Faça pausas para comentar sobre como o jogo está indo.
- 4 Quando o jogo terminar, reserve um tempo para fazer comentários.

Dicas úteis

- Verifique a pasta Jogos de Palavras em Palavras de Tema para obter mais palavras do vocabulário.
- Mensagens como "Minha vez", "Jogar novamente" e "Não gosto desse jogo" já estão programadas no seu dispositivo.
- Peça ao usuário que acompanhe a vez de todos (minha vez, sua vez), selecionando os botões apropriados.



Atividade: Assistir a esportes

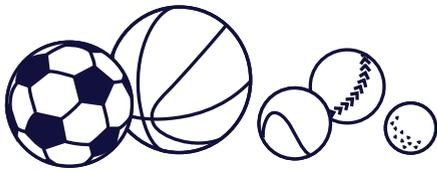

Materiais

- Tema de esportes do TD Snap® Core First
- Um evento esportivo favorito

Preparação

Selecione Temas na barra de ferramentas. Localize o Tema de Esportes e revise o vocabulário antes de começar a atividade.



Etapas


- 1 Apresente o evento esportivo que você está assistindo e analise o que os times estão jogando.
- 2 Demonstre como navegar e ativar os botões para fazer comentários divertidos durante o jogo.
- 3 Quando a atividade terminar, analise todas as tentativas de comunicação bem-sucedidas (por exemplo, "Gostei muito de como você apontou para a bola para me mostrar que gostou dela").

Dicas úteis

- Use o botão de edição para adicionar seu time favorito ao botão que diz "Time favorito []".
- Mensagens como "Tem algum jogo hoje?", "Eu amo esse time" e "Eles não cheiram bem" já estão programados no seu dispositivo.
- Se você tiver um botão vazio, programe um torcida divertida para seu time.



Atividade: Ir a um restaurante

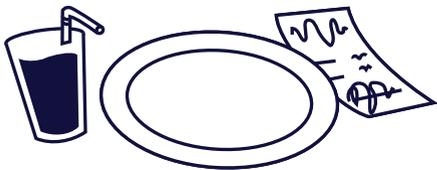

Materiais

- Tema de restaurante do TD Snap® Core First
- Um restaurante favorito

Preparação

Selecione Temas na barra de ferramentas. Localize o Tema de Restaurante e revise o vocabulário antes de começar a atividade.



Etapas

- 1 Discuta ir ao restaurante.
- 2 Você pode começar a modelar o vocabulário antes mesmo de chegar ao restaurante. Por exemplo, selecione o botão "Vamos sair para jantar".
- 3 Quando estiver no restaurante, modele com o dispositivo durante toda a refeição.
- 4 Uma vez terminada a sua refeição, revise as tentativas de comunicação bem-sucedidas. (Por exemplo, "quando você pressionou "mais" eu sabia que era para passar a carne!").

Dicas úteis

- Mensagens como "Podemos sair para comer?" e "Adoro este lugar" já estão programadas no seu dispositivo.
- Incentive todos na mesa a se envolver, incluindo a equipe de garçons.



Como usar o Google Assistente com o TD Snap®

As páginas do Google Assistente disponíveis no TD Snap® são organizadas por função. Os botões nessas páginas permitem gerenciar as tarefas diárias, reproduzir músicas, fazer perguntas e até mesmo controlar sua casa com o Google Assistente.

Para encontrar as páginas do Google Assistente no TD Snap®:

1 Seleccione o **Painel** na barra de ferramentas.



2 Seleccione **Google Assistente**.



Os ícones indicam o equipamento necessário para utilizar esse botão.



Nenhum outro hardware é necessário.



É necessário um dispositivo Google Nest Mini ou alto-falante habilitado para o Google Assistente.



É necessário uma tomada, lâmpada ou termostato inteligente.

Dicas úteis:

- Reproduzir músicas em um volume muito alto pode dificultar a ação de desligar a música posteriormente ou dar comandos.
- Caso você não receba a resposta que esperava ao dar um comando ao Google, tente palavras diferentes ou seja mais específico.
Exemplo: Se “Ok Google, acenda a luz” não funcionou, tente “Ok Google, acenda a luz da sala de estar”.
- Lembre-se: ao usar um alto-falante externo do Google, é preciso dizer “Ok Google” antes do comando.
- Certifique-se de ter uma forma de solicitar ajuda e um sistema de backup para as funções de automação da residência.
- Os jogos funcionam melhor quando não precisam de respostas específicas e quando oferecem bastante tempo para responder.

Perguntas mais comuns sobre o Google Assistente

Preciso do aplicativo Google Home?

Sim, você precisará do aplicativo Google Home no seu telefone ou tablet, se tiver comprado um equipamento adicional (por exemplo, Google Nest Mini, tomadas e conectores inteligentes etc.).

Preciso de uma conta Google?

Sim, você precisa ter uma conta gratuita do Google para usar o Google Assistente. Você deverá conectar sua conta Google ao TD Snap® (*Editar>Usuário>Conectar ao Google*).

Posso ouvir músicas?

Sim, você deverá usar um alto-falante externo do Google (ex.: Google Nest Mini, Google Home Nest etc.) e garantir que o dispositivo ainda possa ser ouvido além da música.

Posso controlar as luzes da minha residência?

Sim, com o equipamento de iluminação correto, é possível controlar as luzes da sua residência.

Eu possuo um eletrodoméstico inteligente na minha casa. Posso controlá-lo com o Google Assistente?

Sim. Consulte o guia que acompanha o eletrodoméstico inteligente para obter mais detalhes.

Posso utilizar o Google Assistente para chamadas de emergência?

Não. O Google Assistente NÃO chamará os serviços de emergência.

Como faço para obter suporte?

Se tiver problemas com o TD Snap®, entre em contato com o suporte técnico da Tobii Dynavox.

Para problemas com o equipamento inteligente, acesse o site do fabricante.

Solução de problemas na ajuda do Google

qrco.de/GoogleAssistantExplore

qrco.de/GoogleAssistantHelp

qrco.de/GoogleNestHelp



Leia o guia completo do Google Assistente para TD Snap®.

qrco.de/gatdsa

Editar suportes visuais

- 1 Encontre a página Suportes que contém o suporte visual a ser editado.



- 2 Selecione **Editar**.



- 3 Selecione o botão para o suporte que deseja editar.



- 4 Selecione a ação (Minicronograma, Temporizador Visual, Primeiro... Então ou Script).

- 5 Selecione o ícone de lápis em qualquer linha para fazer alterações.



- 6 Selecione o botão Visualizar na parte inferior do painel de edição de suporte para visualizar suas alterações no suporte visual.

- 7 Ao finalizar, selecione **Concluído**.

Alterar tamanhos da grade

Recomendamos priorizar a capacidade do usuário de selecionar botões com precisão. O ato de acessar fisicamente o dispositivo de comunicação requer prática. Comece com um tamanho de grade menor. À medida que o usuário se acostuma a usar o dispositivo, ele pode acessar tamanhos de grade maiores. Alterar o tamanho da grade é fácil, e o conjunto de páginas do TD Snap® Core First foi projetado para manter a localização do vocabulário consistente em todos os tamanhos de grade.

- 1 Seleccione o botão **Editar**.



- 2 Seleccione a guia **Conjunto de páginas**.



- 3 Seleccione **Tamanho de grade**.



- 4 Faça uma seleção nos tamanhos de grade otimizadas.

- 5 Seleccione **Concluído**.



Leia este código para ver um pequeno vídeo sobre como alterar o tamanho da grade.

qrco.de/bbGQvI

Suporte adicional



Página de suporte do TD Snap®

qrco.de/SnapHelp



Comunidade TD no Facebook

qrco.de/TDFB



Suporte técnico no Brasil

(11) 3884-2423

Aprenda a editar botões, fazer backup e compartilhar conjuntos de páginas e usar outros recursos do TD Snap®:



Cartões de treinamento do TD Snap® Basics

qrco.de/bdcNH1



Manual do usuário do TD Snap®

qrco.de/tdsumPT



Hub de aprendizagem Tobii Dynavox (apenas inglês)

learn.tobiidynavox.com