


Rychlý průvodce začátkem

Tobii Dynavox Speech Case



tobiidynavox

Co je v balení?

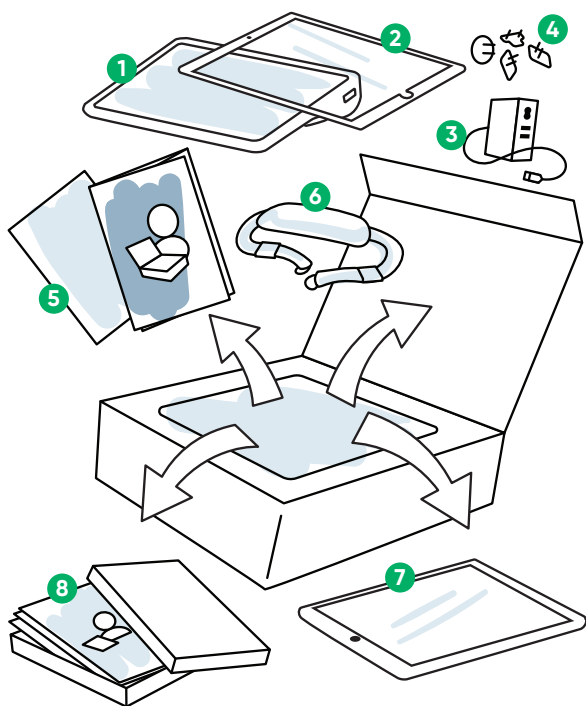


- 1 Speech Case
 - 2 Kryt rámu iPadu
 - 3 Napájecí kabel
 - 4 Univerzální napájecí adaptéry
 - 5 Návod k použití
 - 6 Popruh pro přenášení
- Navíc s SC tabletem:
- 7 iPad
 - 8 Tréninkové karty TD Snap





Jestliže jste zakoupili magnetickou úchytku desku nebo kryt kláves, viz příložené pokyny.

Seznámení se zařízením

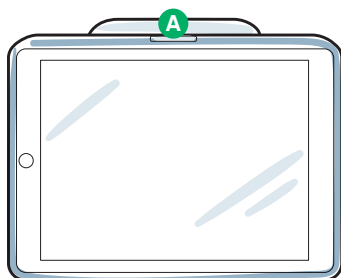

Přední strana

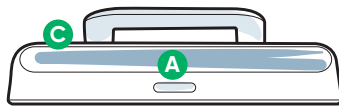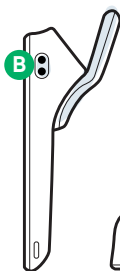

Vršek a boky



A Přepínač hlasitosti

B Porty na spínače

C Reproduktory

D Napájecí port (USB-C)

E Volič způsobu ovládání

Chcete-li nastavit své zařízení Speech Case/SC tablet, proveďte čtyři kroky popsané v tomto průvodci.


Než začnete



Jestliže jste zakoupili SC tablet (souprava Speech Case a iPad), pak pro dokončení procesu nastavení zapněte iPad a postupujte dle pokynů na obrazovce. Nezapomeňte vybrat možnost **Nastavit manuálně** a ihned po zobrazení výzvy vyberte síť Wi-Fi.

Krok 1: Vložte iPad do zařízení Speech Case

- 1 Položte iPad (obrazovkou nahoru) na rovný povrch.
- 2 Umístěte krycí rámeček pro iPad na iPad a stiskem jej zatlačte na místo.
- 3 Srovnejte nabíjecí port iPadu s odpovídajícím otvorem na zařízení Speech Case, poté posuňte okraj iPadu pod ohebný okraj v horní části zařízení Speech Case.
- 4 Zarovnejte iPad tak, aby ležel uvnitř zařízení Speech Case.
- 5 Ohebný okraj prsty ohněte a přehněte kolem iPadu.

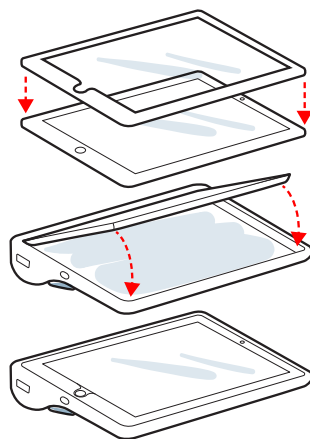

Krok 2: Nastavte režim


Zařízení Speech Case má tři režimy: dotyk (T), skenování iOS (S) a vypnuto (O). Režim na voliči způsobu ovládání nastavte **PŘED** použitím zařízení. Nejvhodnější režim pro daného uživatele zvolte na základě rozhodovacího stromu níže.




Dotyk (T): Jednotka řekne „Zapnuto“ a jednou cvakne.

Skenování (S): Jednotka řekne „Zapnuto“ a dvakrát cvakne.

Vypnuto (O) slouží pro přepravu a dlouhodobé skladování.

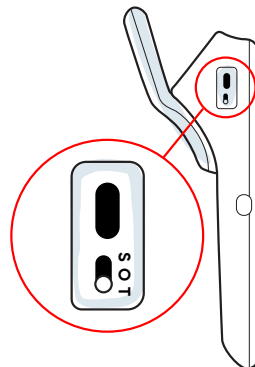


Jak uživatel provádí volby na zařízení?

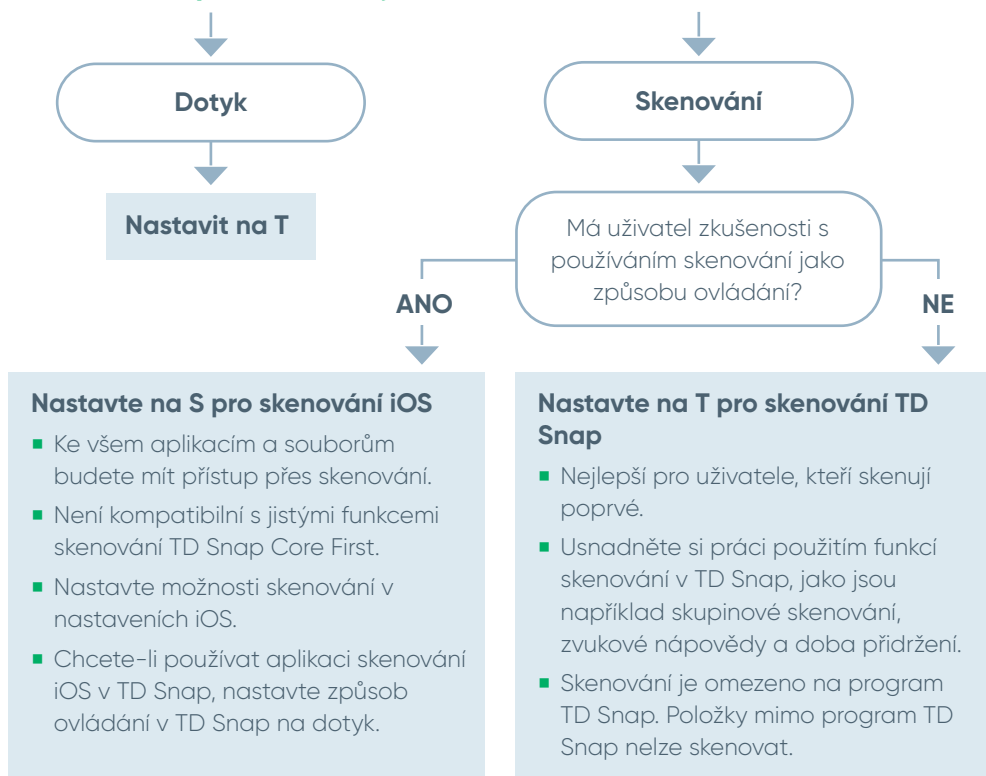

Potřebujete-li změnit režim, postupujte dle informací v návodu k použití pro Speech Case.


Krok 3: Párování přes Bluetooth

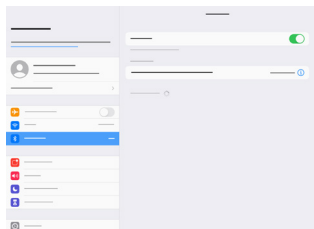

- 1 Na iPadu přejděte na Nastavení > Bluetooth.
- 2 Ujistěte se, že je Bluetooth zapnuto.
- 3 Vyberte Tobii Dynavox SC tablet.



Jestliže používáte více SC tabletů v jedné místnosti, můžete je od sebe odlišit za pomoci pěti číslic z Bluetooth ID. Budou se shodovat s unikátním pětimístným sériovým číslem umístěným pod zabudovaný stojan zařízení Speech Case.

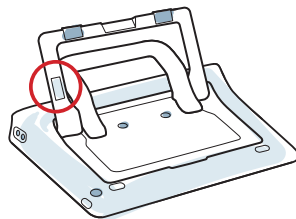

Krok 4: Začínáme s programem TD Snap



Průvodce nastavením pro TD Snap

Spustíte aplikaci TD Snap.

Postupujte dle pokynů a vytvořte svého prvního uživatele, anebo obnovte uživatele z uloženého souboru.

Rádi vám pomůžeme



myTobiiDynavox

Využijte svůj účet zdarma pro synchronizaci, sdílení sad stránek, ukládání záloh a další! Navštivte:

www.myTobiiDynavox.com



Výukové centrum

Výukové centrum Tobii Dynavox:

learn.tobiidynavox.com



Studijní materiály

Návod k použití:

<https://qrco.de/SCmanual>

Tréninkové karty TD Snap Core First:

<https://qrco.de/TDSnapCards>

Tréninkové karty TD Snap Text:

<https://qrco.de/TextCards>

Tréninkové karty TD Snap Afázie:

<https://qrco.de/AphasiaCards>

Průvodce skenováním TD Snap:

<https://qrco.de/ScanGuide>



Dodatečná podpora

Komunita:

<http://qrco.de/TDFB>

Pro technickou podporu se obraťte na zástupce Tobii Dynavox ve vaší zemi.

Další zdroje pro
Speech Case
naleznete zde:



qrco.de/TDSCinfo