



TD Pilot med TD Talk

Kom i gang-veiledning

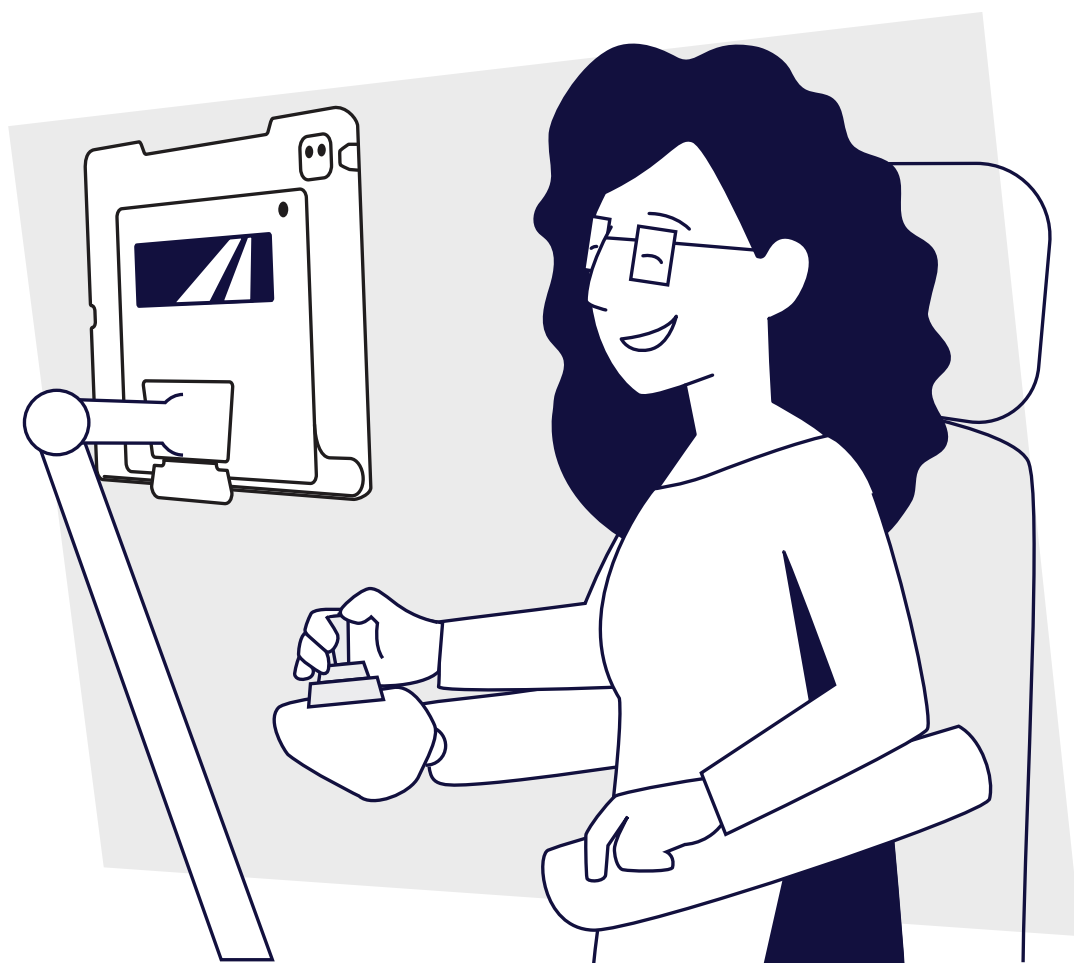

Hva er i esken?

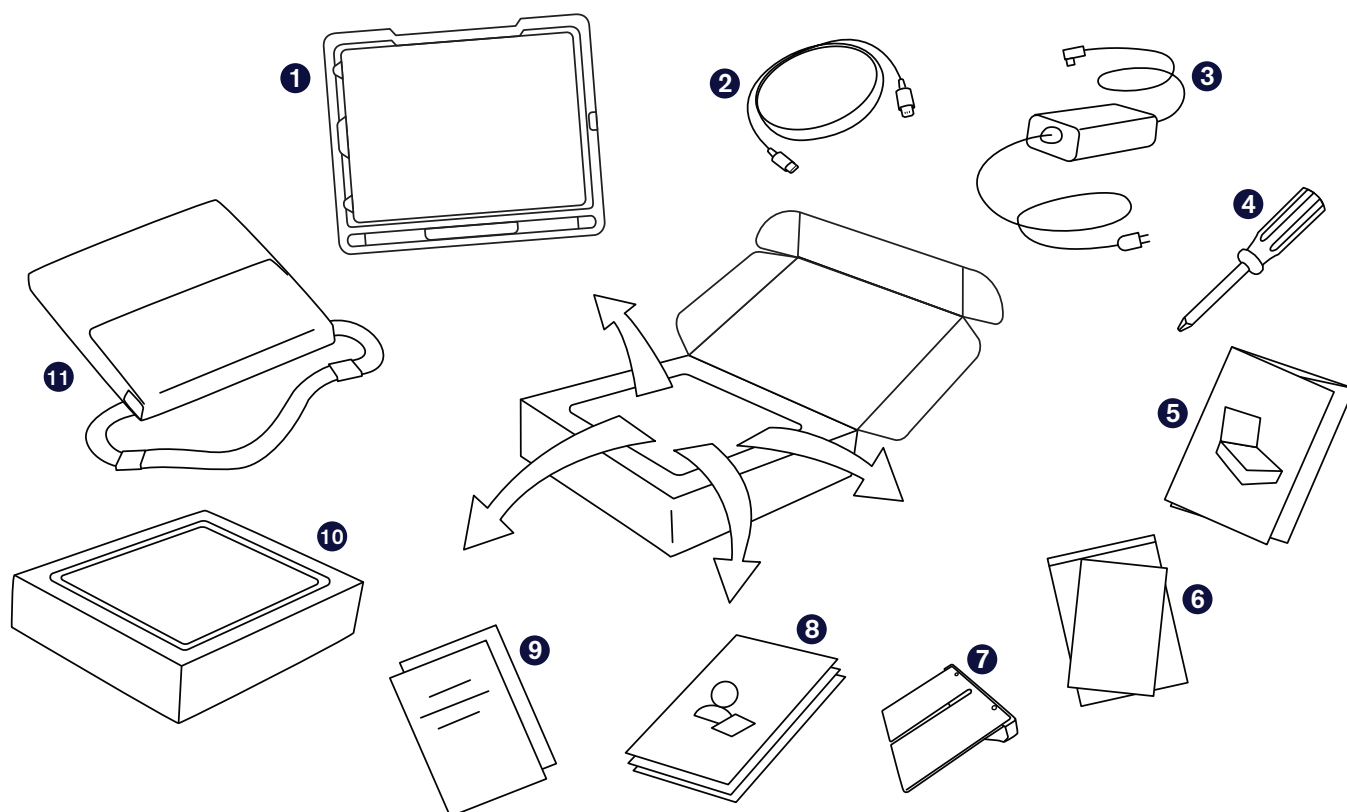

1 Forhåndsmontert enhet

(iPad Pro 12.9, TD Pilot-base, beskyttelsesdeksel, ConnectIT/Rehadapt monteringsplate, tilkoblingskabel USB-C til USB-C, forhåndsinstallert batteri)

2 Tilkoblingskabel Lightning – USB C

3 Lader med kabel

4 Skrutrekker

5 Kom i gang-veiledning

6 Dokument om sikkerhet og samsvar

7 Justeringsbrakett

8 Opplæringskort for TD Talk og AssistiveTouch

9 Garantidokumenter

10 iPad-eske (med iPad-lader)

11 Bæreveske

La oss komme i gang

Denne veiledningen er designet for to personer: personen som skal bruke enheten til å kommunisere med og en assistent som kan berøre skjermen og flytte på enheten. Delene med håndikonet må fullføres av assistenten. Delene med øyeikonet bør fullføres av personen som kommer til å bruke enheten med øyestyring. Når dere har fullført trinnene i denne veiledningen vil brukeren kunne bruke øyestyring til kommunisere i TD Talk-appen.




Assistent



Bruker

Slå på

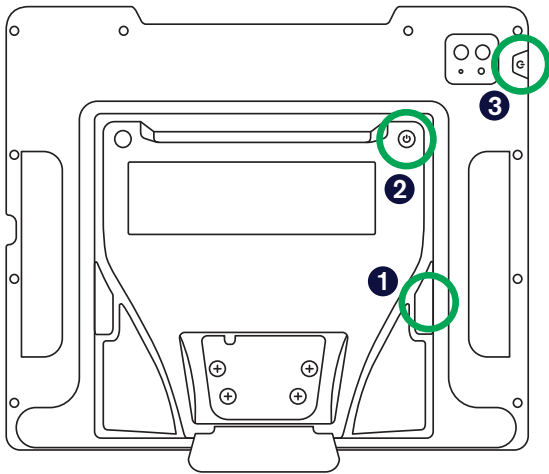

- 1 Åpne beskyttelsesdekselet over portene, og koble laderkabelen til ladeporten på siden av TD Pilot-basen. Koble så strømledningen til en stikkontakt.
- 2 Trykk på strømknappen på baksiden av TD Pilot for å slå den på.
- 3 De fleste iPad-modeller slår seg på når TD Pilot-basen slås på. Hvis iPaden ikke slår seg på, trykker du på strømknappen på iPaden for å slå den på.

IPad-oppsett

Følg instruksjonene på skjermen for å sette opp iPad-en. Du må gjøre følgende valg under installasjonen for å motta Tobii Dynavox-programvaren som er inkludert i kjøpet:

- 1 Velg språk og region.
- 2 Velg **Konfigurer manuelt** på skjermbildet Hurtigstart.
- 3 Koble til et Wi-Fi-nettverk og velg **Neste**.
- 4 Velg **Neste** på skjermbildet Fjernstyring.
- 5 Godta Apples vilkår og betingelser.
- 6 Svar på de resterende oppsettsmeldingene basert på dine egne preferanser.

Når du har fullført oppsettet av iPad-en, vil du se hjemskjermen med app-ikoner.



Merk

Fjernstyring, også kjent som MDM, gjør det mulig for Tobii Dynavox å sende programvare- og programvareoppdateringer til iPad via Wi-Fi. Fjernstyring gir Tobii Dynavox tilgang til kun informasjon om iPadens maskinvarespesifikasjoner, OS-versjon, installerte apper og sikkerhetsinnstillinger. Tobii Dynavox vil ikke kunne få tilgang til personlige filer, bilder, kameraer, mikrofoner eller stedsdata.



Strømstyring for TD Pilot

TD Pilot må være slått på og koblet til en ekstern strømforsyning for å kunne lade iPad.

Øyestyring er alltid aktivt når TD Pilot er slått på, selv om iPad-skjermen er låst. Det fører til at batteriene tappes når TD Pilot er slått på og ikke er koblet til en ekstern strømforsyning. Det er best å la TD Pilot være slått på og koblet til laderen når du ikke bruker den.

Du finner informasjon om batteristatus i *TD CoPilot > Innstillinger > Batteri*.

Se brukerveiledningen for TD Pilot for ytterligere informasjon om strømstyring.

Oppsett av øyestyringstilgang

Konfigurer skjermen for øyestyring

- 1 Trykk på **Innstillinger**.



- 2 På venstre side, trykk på kategorien **Startskjerm og multitasking**.
- 3 På høyre side, velg **Bruk store appikoner** for å gjøre ikonene større.
- 4 På venstre side, trykk på kategorien **Skjerm og lysstyrke**.
- 5 På høyre side, trykk på **Mørkt**.
- 6 På høyre side, skroll ned og trykk på **Tekststørrelse**.
- 7 Flytt glidebryteren for tekststørrelse helt til høyre.



Merk

Dette øker tekststørrelsen i alle kompatible apper.

- 8 Trykk på **Skjerm og lysstyrke** på venstre side for å komme tilbake til innstillingene for skjerm og lysstyrke.
- 9 På høyre side, skroll ned og trykk på **Zoom for visning**.



Merk

Denne innstillingen er ikke tilgjengelig på iPad-enheter som er mindre enn 11 tommer.

- 10 Velg **Større tekst**.



Hva har AssistiveTouch med øyestyring å gjøre?

AssistiveTouch er designet for personer som har vanskeligheter med å berøre skjermen. AssistiveTouch-menyen gjør at du kan gjennomføre «berøringsfunksjoner», slik som å trykke og skrolle, ved hjelp av øyestyring. Den har også snarveier til ting som hjemskjermen og appveksleren som man vanligvis finner ved hjelp av berøringsbevegelser, tilgjengelig med øyestyring.

Oppsett av AssistiveTouch

- 1 Trykk på **Innstillinger**.



- 2 På venstre side, trykk på **Tilgjengelighet**.

- 3 På høyre side, trykk på **Berøring**.

- 4 Trykk på **AssistiveTouch**, og slå den på.

Øyestyring er nå aktivert. Du vil se pekeren, som viser hvor blikket ditt er. AssistiveTouch-menyknappen vises også på skjermen.




Merk

Hvis du bes om å tilpasse øverste menynivå, trykk **Nei**.

- 5 Dra menyknappen for AssistiveTouch til den øverste tredjedelen av skjermen på høyre side.

Tilpass AssistiveTouch-menyen

- 1 På høyre side, velg **Tilpass øverste menynivå**.
- 2 Trykk på **+** for å endre antallet ikoner til 8.
- 3 Trykk på **Varslingssenter**.
- 4 Bla til bunnen av listen, og trykk på **Sett dvel på pause / fortsett dvel**. Trykk utenfor listen for å lukke den.
- 5 Trykk på **Bevegelser**-knappen.
- 6 Bla til og trykk på **Flytt meny**. Trykk hvor som helst utenfor listen for å lukke den.
- 7 Fortsett å redigere menyikonene frem til menyen din er lik som den som vises til høyre.
- 8 På venstre side, velg **Tilgjengelighet**.
- 9 På høyre side, velg **Berøring**.
- 10 På høyre side, velg **AssistiveTouch**.

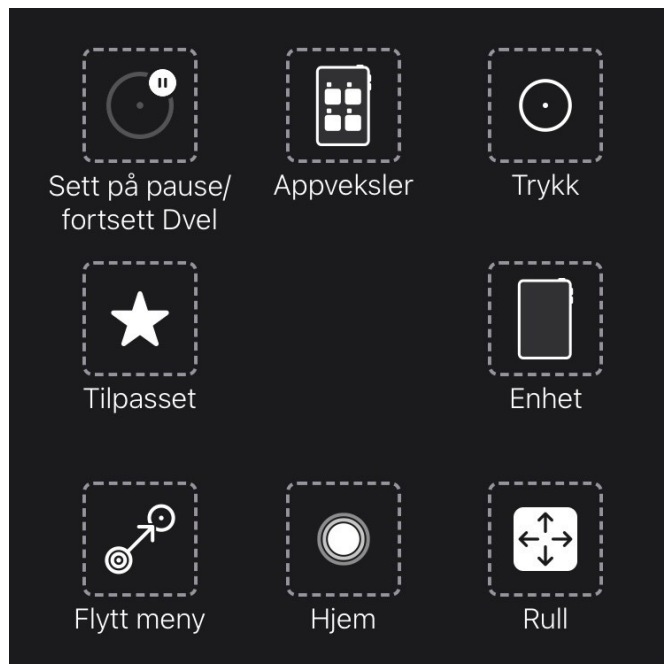

Konfigurer dvelekontroll

- 1 På høyre side, bla til bunnen av AssistiveTouch-menyen. Slå på **Dvelekontroll**.



Merk

Hvis du bes om å tilpasse øverste menynivå for AssistiveTouch, trykk **Nei**.

- 2 Trykk på pluss- eller minustegnet siden av **Sekunder** for å endre dvelestiden til 1,5 sekunder.



Tips

Denne tidsinnstillingen er for å komme i gang. Du kan endre dveletiden igjen senere så den passer til behovene dine.

Vekke og låse opp iPaden


IPad-en vekkes automatisk når øystyringsenheten oppdager brukerens øyne. Lås opp iPad-en ved å velge AssistiveTouch-knappen og deretter Hjem.

Prøv det nå:

- 1 Trykk på den øverste knappen for å låse iPad-en.
- 2 Se på skjermen i noen øyeblikk. Ipad-en vekkes og viser låst skjerm.
- 3 Trykk på eller bruk øynene til å velge **AssistiveTouch-menyknappen**, og velg deretter **Hjem**.



IPaden er nå låst opp.

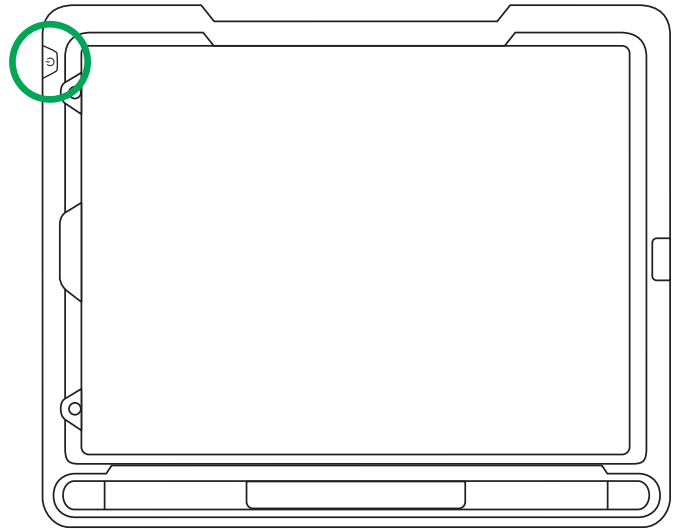

Tips

Hvis du ønsker ekstra sikkerhet på enheten din, anbefaler vi å bruke Face ID. Med Face ID kan låse opp enheten din uten å angi et passord hver gang. Sett opp Face ID i *iPad OS-innstillinger > Face ID og kode*.

Oppsett av TD Talk

- 1 Trykk på **TD Talk**-appen.



- 2 Sveip opp fra bokstaven T på TD Talk-tastaturet for å åpne menyen utenfor skjermen.

- 3 Trykk på **Mer**-knappen.



- 4 Trykk på **Innstillinger**.



- 5 Angi grensesnittspråket for TD Talk:

- Trykk på **høyre pil** for å navigere til **Generelle innstillinger**.
- I Generelle innstillinger trykker du på **Åpne**.
- Velg språket du ønsker.
- Velg **Tilbake** for å gå tilbake til Innstillinger.



Valgfritt: Legg til flere tastaturspråk.

- 1 Gå til **Meny utenfor skjermen > Mer > Innstillinger > Tastatur > Legg til / endre**.
- 2 Velg et språk fra Installert-fanen, eller gå til Last ned-fanen for å finne andre språk.
- 3 Når språket er installert, blir du bedt om å velge en stemme for det nye språket. Velg **Stemmer**, og velg en stemme.



Merk

Stemmene øverst på listen er lastet ned og klare til bruk. Stemmene nederst på listen er tilgjengelige for nedlasting.




Tips


Når du bruker TD Talk, kan du raskt bytte språk ved å velge globusen i nedre venstre hjørne av tastaturet.

Stativ og plassering


Forbered brukeren på å begynne å bruke øyestyring ved å plassere dem komfortabelt. Hvis de bruker briller, må du sørge for at de har dem på og at brilleglassene er rene.

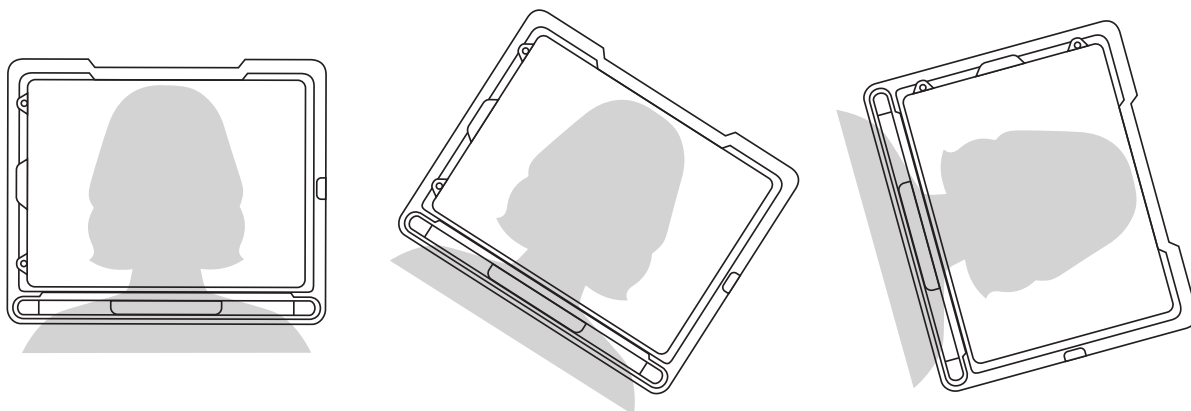

Plasser TD Pilot på monteringsystemet eller en stabil flate foran brukeren i, eller rett nedenfor brukerens øyehøyde. Hvis hodet deres er lent mot venstre eller høyre, vipp TD Pilot for å matche. Det er viktig at vinkelen på skjermoverflaten er lik som vinkelen til brukerens ansikt. De fleste brukere må ha TD Pilot plassert høyere enn bordplaten når de sitter ved et bord eller en pult.

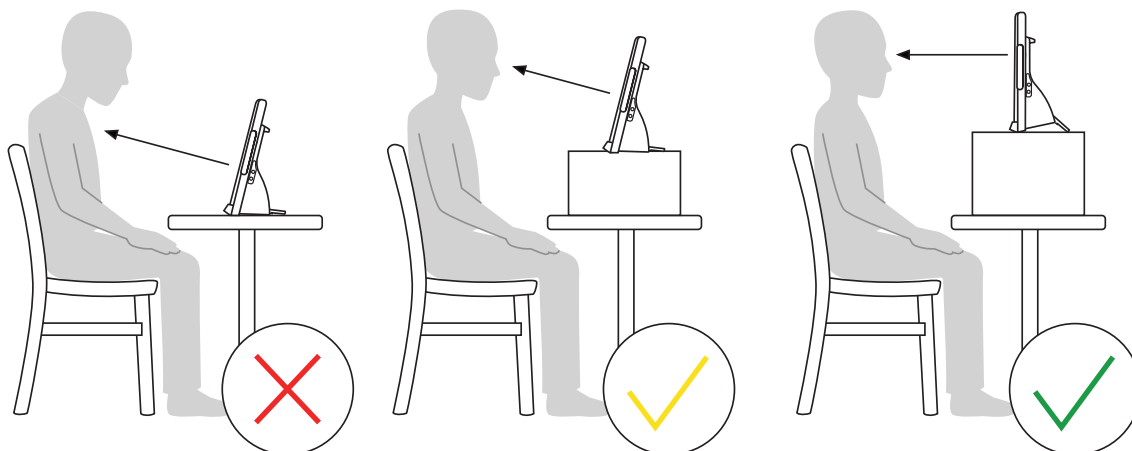

Det er mulig du må justere enhetens posisjon i løpet av kalibreringstrinnene på neste side. Alltid juster enheten for å passe til brukeren, ikke motsatt.

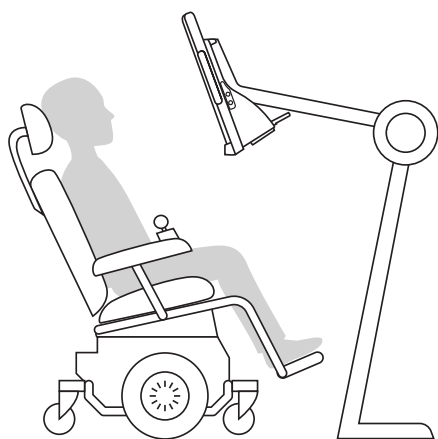

Merk


En stativløsning er det beste alternativet for en presis posisjonering av enheten, og kan lett justeres ved behov. Det finnes flere monteringsalternativer, inkludert gulvfester, skrivebordsfester og rullestolfester. Gå til [TobiiDynavox.com](https://www.tobii.com/dynavox) eller kontakt din lokale Tobii Dynavox-partner.

Kalibrer

- 1 Trykk på **CoPilot**-appen.



- 2 Følg instruksjonene på skjermen i CoPilot for å kalibrere øyestyrsenheten til brukerens øyne.

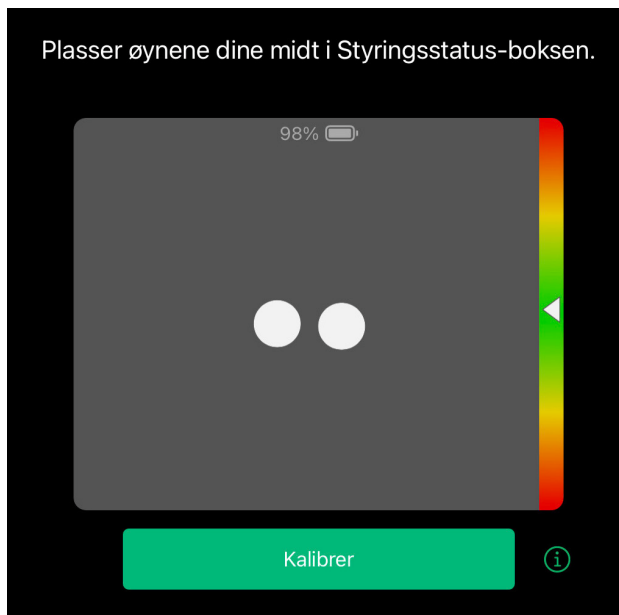

- 3 Når brukeren er ferdig med å kalibrere, sveip opp fra bunnen av skjermen for å komme tilbake til hjemskjermen.



De gjenværende trinnene bør gjennomføres av brukeren av TD Pilot-enheten ved hjelp av øyestyring. Du, som assistent, kan lese instruksjonene høyt. Les i en hastighet som gir brukeren tilstrekkelig tid til å gjøre valgene med øynene sine.

Prøv det

TD Pilot er nå klar til bruk! Bruk øynene dine til å fullføre opplæringen nedenfor.



Åpne TD Talk

Bruk øynene dine til å velge **TD Talk**-appen.



Merk

Hvis du har problemer med å velge med øynene nå, kan assistenten din trykke på skjermen for deg frem til du kommer deg inn i TD Talk. Øyestyring er en ferdighet, så øv deg i TD Talk for å bli kjent med den.

Skriv og snakk

Bruk øyestyring til å si noen ord og fraser i TD Talk.

- Presenter deg selv.
- Kommenter noe om været.
- Bruk tastaturet til å si alderen din eller telefonnummeret ditt.

Fortsett til opplæringskortene for TD Talk

Fortsett oppsettet med opplæringskortene for TD Talk. Opplæringene og feilsøkingforslagene i opplæringskortene kan hjelpe deg med å forbedre øyestytingsopplevelsen, og til å bruke TD Talk til å kommunisere raskere og mer effektivt. Du vil også lære mer om å bruke AssistiveTouch for å få tilgang til andre apper på iPaden din ved hjelp av øyestyring.



Opplæringskort for TD Talk

qrco.de/beRLTU

Flere ressurser

Skann QR-kodene eller bruk lenkene.



myTobiiDynavox
mytobiidynavox.com



Apple
apple.com/no/accessibility



TD-felleskap på Facebook
qrco.de/fbno



**Tobii Dynavox-opplæringsvideoer
(kun på engelsk)**
learn.tobiidynavox.com



Brukerveiledning for TD Pilot
qrco.de/PilotDocs



Støttesiden for TD Pilot
qrco.de/PilotHelpNO



Opplæringskort for programvare
qrco.de/trainingcards



Tobii Dynavox Norge YouTube
qrco.de/bdeZk5



Teknisk support
55 55 10 60



Dokumentasjon
TD CoPilot > Innstillinger > Hjelp