

TD Talk voor iPadOS selectiemethode Aanraken

Trainingskaarten



Inhoud

- 1 TD Talk instellen
- 2 TD Talk-rondleiding
- 3 TD Talk gebruiken
- 6 Oefenen met TD Talk
- 7 Problemen met Touch Access oplossen
- 8 Veelgestelde vragen
- 8 myTobiiDynavox.com
- 9 Aanvullende bronnen

TD Talk instellen

- 1 Tik op de **TD Talk**-app.



- 2 Plaats uw vinger op de letter T op het TD Talk-toetsenbord en veeg omhoog om het schermmenu te openen.

- 3 Tik op de **Dashboard**-knop.



- 4 Tik op **Instellingen**.



- 5 Stel de TD Talk-interfacetaal in:

- Tik op de **pijl-rechts** totdat u het paneel Algemeen ziet.
- Ga naar rechts om de Algemene instellingen te vinden en tik op **Openen**.
- Selecteer in Applicatietaal **Wijzigen**. Selecteer de taal van uw keuze.
- Selecteer twee keer **Terug** om terug te gaan naar Instellingen.



- 6 Kies uw stemmen.

Standaardstemmen:

- Tik op Stem op **Openen**.
- Selecteer **Stemmen**.
- Selecteer boven in het scherm de taal waarvoor u een stem wilt toewijzen.
- Selecteer een stem.
- Selecteer **X** om TD Talk Instellingen te verlaten.

Voice Banking en Aangepaste stemmen:

- Tik op Stem op **Openen**.
- Selecteer **Beheren** onder Voice Banking-accounts.
- Naast de voice banking services waarvoor u stemmen hebt, selecteert u **Aanmelden** om uw gegevens voor die service in te voeren.
- Selecteer uw stem(men) voor gebruik in TD Talk.



Opmerking

Extra voices zijn beschikbaar op het tabblad Steminstellingen downloaden. Selecteer het downloadpictogram naast de stem(men) die u wilt gebruiken. Wanneer ze zijn gedownload, gaat u naar het tabblad Geïnstalleerd en selecteert u de stemmen die u wilt gebruiken.

Optioneel: Voeg aanvullende toetsenbordtalentoe.

- 1 Ga naar **offscreenmenu > Meer > Instellingen > Toetsenbord > Toevoegen/wijzigen**.
- 2 Selecteer een taal op het tabblad Geïnstalleerd of ga naar het tabblad Downloaden om andere talen te vinden.
- 3 Wanneer uw taal geïnstalleerd is, wordt u gevraagd een stem te kiezen voor de nieuwe taal. Selecteer **Stemmen** en kies vervolgens een stem.




Tip


Als u TD Talk gebruikt, kunt u snel van taal wisselen door de wereldbol linksonder op het toetsenbord te selecteren.

TD Talk-rondleiding

TD Talk is ontworpen voor snelle, face-to-face communicatie. Gebruik deze app wanneer u met anderen interactie hebt.



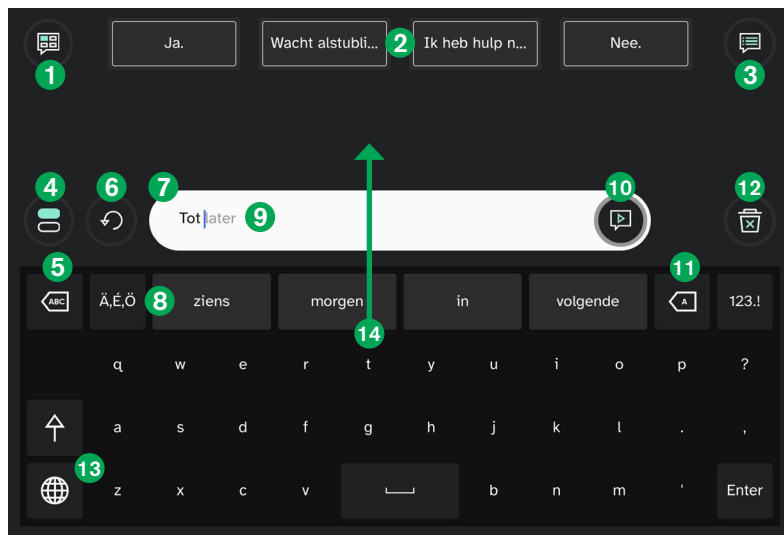


- 1 Onderwerpen**
Organiseer uw Korte berichten op onderwerp. Schakel over naar een onderwerp om die berichten te openen.
- 2 Korte berichten**
Vooraf opgestelde berichten die onmiddellijk uitgesproken worden wanneer u ze selecteert.
- 3 Meer Korte berichten**
Open de pagina Korte berichten om uw Snelberichten uit te laten spreken of te bewerken.
- 4 Chatten**
Schakel over naar een tweede berichtenvenster om een nieuw bericht op te stellen zonder de tekst in het eerste berichtenvenster te verliezen.
- 5 Woord verwijderen**
Verwijder het woord links van de cursor.
- 6 Ongedaan maken**
Maakt de acties in het berichtenvenster ongedaan.
- 7 Berichtenvenster**
Bekijk en bewerk de tekst die u hier zou willen zeggen.
- 8 Woordvoorspelling en uitbreidingen voor afkortingen**
Voorspelt automatisch woorden op basis van wat u tot nu toe hebt getypt. Als u een voorgeprogrammeerde afkorting typt, wordt hier de uitbreidingsoptie weergegeven.
- 9 Zinsvoorspelling**
TD Talk leert van wat u typt en gebruikt die informatie om zinnen te voorspellen. De voorspelling is gebaseerd op frequentie en maakt communicatie sneller en persoonlijker.
- 10 Spreken**
Spreek de tekst uit in het Berichtenvenster. U kunt ook het uitspreken pauzeren en hervatten.
- 11 Backspace**
Verwijder het teken links van de cursor.
- 12 Wissen**
Wis alle tekst in het Berichtenvenster.
- 13 Taal wijzigen**
Schakel tussen de talen die u spreekt.
- 14 Offscreenmenu**
Plaats uw vinger op de letter T en veeg omhoog om het offscreenmenu te openen.
- 15 Dashboard**
Ga naar het Dashboard en Instellingen.
- 16 Zie Doorkijkmodus**
Maak de TD Talk interface doorzichtig en zet de camera op de achterkant aan. Deze modus kan gebruikt worden om te zien wat er zich voor uw apparaat bevindt, zoals uw communicatiepartner, terwijl u TD Talk gebruikt.

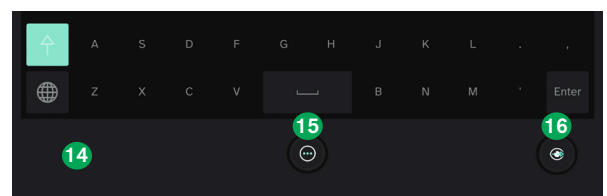

TD Talk gebruiken

Deze tips kunnen u helpen om TD Talk met succes te gebruiken.

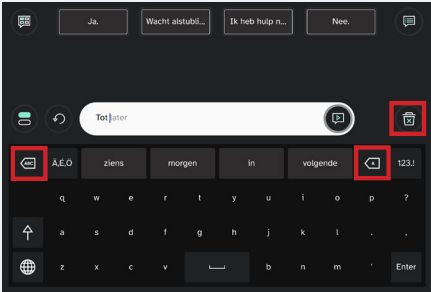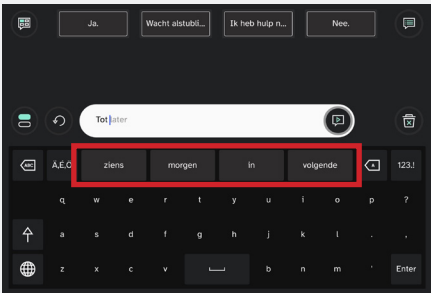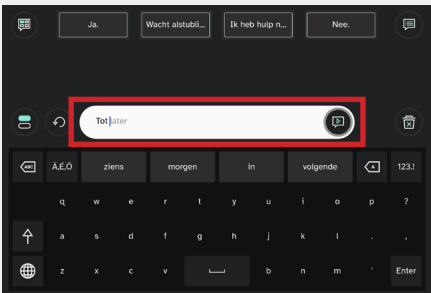
het toetsenbord	
Tip	Probeer het
Typ en verwijder Gebruik de toetsenborden en de wistoetsen om berichten te typen en te bewerken. 	1 Maak uzelf vertrouwd met het toetsenbord. 2 Zoek deze toetsen: Wissen, Woord wissen en Backspace. 3 Open het 123!-toetsenbord en ga dan terug naar het ABC-toetsenbord.
Benut woordvoorspelling. Woordvoorspelling leert van wat u typt en kan uw communicatie versnellen. 	1 Wanneer u een woord begint te typen, kijk dan naar de woordvoorspellingsknoppen om te zien of het woord dat u wilt er tussen staat. 2 Herhaal dit elke 2 - 3 letters. 3 Als het woord dat u probeert te typen op een van de woordvoorspellingsknoppen verschijnt, tikt u op de toets om het woord aan het berichtenvenster toe te voegen.
Gebruik zinsvoorspelling. Zinsvoorspelling leert hoe u woorden samenvoegt en voorspelt wat u wilt zeggen op basis van frequentie van gebruik. Hoe meer u spreekt met TD Talk, hoe beter de zinsvoorspelling wordt, zodat u sneller en gemakkelijker kan zeggen wat u wilt. 	1 Kijk naar het Berichtenvenster na elke woord of na elke twee woorden om te zien of TD Talk een zin heeft voorspeld. De voorspelde tekst verschijnt in het grijs na de tekst die u hebt getypt. 2 Als de voorspelde zin is wat u wilt, raak dan het laatste woord in de voorspelling aan om het te voorspellen. 3 Als de voorspelde zin niet is wat u wilt, ga dan door met typen.

Korte berichten

Tip

Onderwerpen en Korte berichten zijn vaak de snelste manier van communicatie.

Gebruik deze bewerkbare aangepaste berichten, die zijn georganiseerd op onderwerp, om onmiddellijke behoeften te uiten, de conversatie gaande te houden en op voorhand voor te bereiden wat u wilt zeggen in gelegenheden zoals doktersbezoek, presentaties en familiebijeenkomsten.

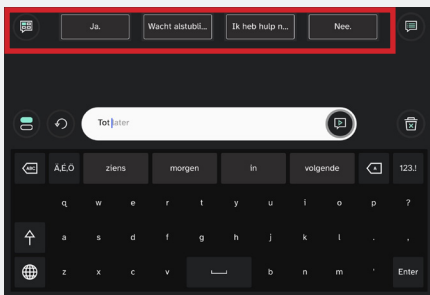


Probeer het

- 1 Selecteer **Onderwerpen**.
- 2 Selecteer **Bewerken**.
- 3 Selecteer **Maken**.
- 4 Voeg een onderwerpnaam toe, zoals 'Dokter', en selecteer **Opslaan**.
- 5 Selecteer **Korte berichten bewerken**.
- 6 Selecteer **Nieuwe toevoegen**. De belangrijkste vier Korte berichten worden boven het toetsenbord weergegeven.
- 7 Voer uw bericht in, zoals 'Ik heb een nieuw voorschrift nodig' en selecteer vervolgens **Opslaan**.
- 8 Selecteer **Sluiten** om terug te keren naar het toetsenbord.

Om uw nieuw Kort bericht te gebruiken, selecteert u **Onderwerpen**, selecteert u uw nieuwe onderwerp en zoekt u vervolgens uw Kort bericht bovenaan het scherm.

Bewerk korte berichten om ze aan uw eigen wensen aan te passen.

Pas de korte berichten aan uw behoeften aan. Sommige berichten kunnen permanent zijn en andere tijdelijk.

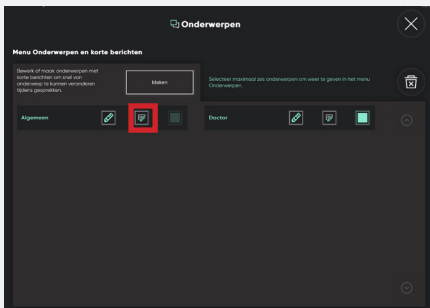

- 1 Selecteer **Onderwerpen** en daarna **Bewerken**.
- 2 Selecteer **Korte berichten bewerken** in het gewenste onderwerp.
- 3 Selecteer het korte bericht dat u wilt bewerken en typ uw bericht met het toetsenbord.
- 4 Selecteer **Opslaan** en ga terug naar het hoofdtoetsenbord

Uitbreidingen voor afkortingen

Tip	Probeer het
Gebruik afkortingen om zinnen sneller te typen. Met uitbreidingen voor afkortingen hebt u snel toegang tot langere zinnen door slechts een paar letters in het berichtenvenster te typen. U kunt bijvoorbeeld 'td' programmeren om de uitbreiding 'Tobii Dynavox' te bieden.	1 Plaats uw vinger op de letter T en veeg omhoog om het offscreenmenu te openen. 2 Selecteer Dashboard. 3 Selecteer Openen op de gesprekkenkaart. 4 Selecteer Bewerken onder Uitbreidingen voor afkortingen. 5 Selecteer Toevoegen. 6 Voeg in het veld Afkorting de afkorting toe die u wilt gebruiken om de uitbreiding te activeren. Gebruik TD als voorbeeld. 7 Voeg in het veld Woord of Bericht de uitbreiding toe. Gebruik Tobii Dynavox als voorbeeld. 8 Selecteer Opslaan. 9 Sluit Instellingen en ga terug naar het toetsenbord van TD Talk. Probeer uw uitbreiding door de afkorting in het berichtenvenster te typen. De uitbreiding wordt weergegeven in de eerste woordvoorspellingsknop bovenaan het toetsenbord. Selecteer de woordvoorspellingsknop met de uitbreiding om de afkorting te vervangen in het berichtenvenster.

Andere communicatietips

Tip	Probeer het
Typ zoals u praat. Gesproken taal verschilt van de meer formele grammatica van geschreven taal. Gebruik gedeelten van zinnen en informele grammatica die uw spreken weerspiegelen.	■ “Wilt u gaan?” ■ “Ik zou het kunnen, maar nee bedankt.” ■ “Volgende keer.”
Gebruik alleen interpunctie en hoofdletters wanneer het uw boodschap verbetert. Punten en hoofdletters kosten tijd en moeite om te typen. Ze maken geen verschil in hoe uw bericht wordt uitgesproken, tenzij de punten zinnen in een paragraaf scheiden.	■ Gebruik ? of ! om uw bericht als een vraag of uitroep te laten klinken. ■ Komma's zorgen voor een pauze in een zin. Gebruik komma's voor nadruk en snelheidsbepaling. ■ Hoofdletters voegen visuele impact toe, maar veranderen niet hoe een woord wordt uitgesproken. TD Talk maakt automatisch van de eerste letter in een zin een hoofdletter voor u. Gebruik desgewenst alleen hoofdletters.

Oefenen met TD Talk

Maak uzelf vertrouwd met het spreken met TD Talk.

Typ een paar weetjes over uzelf (zoals uw naam, uw adres, enz.) en spreek ze vervolgens uit. Oefen met de knoppen Wissen, Woord verwijderen en Backspace.

Spaar tijd uit met woordvoorspelling.

Typ "Ik moet naar het restaurant morgenochtend" zonder woordvoorspelling. Typ dan de zin nog eens met behulp van woordvoorspelling. Vergelijk de tijd en moeite die het kost.

Probeer zinsvoorspelling te gebruiken.

Typ één van de onderstaande zinnen en gebruik dan de knop Spreken in TD Talk om de zin vijf keer te zeggen. Dit zal de zin toevoegen aan uw zinnenverzameling. Maak het Berichtenvenster leeg, en begin dan dezelfde zin nog eens te typen. U zult zien dat de zin voor u voorspeld is. Tik op het laatste woord in de voorspelde zin om het te selecteren, en spreek het dan uit.

- Mijn naam is (u naam).
- Mijn adres is (u adres).
- [Persoon's naam] is mijn [type relatie].
- Ik werk (of werkte) bij [werkgever] als een [functiebenaming].
- Ik gebruik dit apparaat om te communiceren en ik begrijp alles wat u zegt.

Typ zoals u praat.

De zinnen hieronder zouden gebruikt kunnen worden in formele geschreven communicatie. Hoe zou u ze in informeel gesproken conversatie zeggen?

- Laten we vandaag wat tijd uittrekken om over financiën te praten.
- Ik wens u het beste.
- Ik hoop dat het u de afgelopen maanden goed vergaan is.

Denk na over zinnen die u vaak gebruikt in conversaties. De voorbeelden hieronder kunnen u wellicht helpen om er een aantal te identificeren. Typ ze in TD Talk.

■ Uitroep

Geen denken aan! Dat is interessant. Is dat zo?!

■ Vulwoorden of vulzinnen

...zoals..., um..., Ik bedoel, weet u, ...als u me kan volgen, ...en wat dan ook.

■ Regionale woorden en zinnen

Het is snikheet. Komen jullie? Maak de tafel aan kant.

Experimenteer met interpunctie en hoofdletters.

Typ de volgende zinnen en luister naar het verschil tussen met en zonder interpunctie en hoofdletters. Deze activiteit zal u helpen om op te merken wanneer het de moeite waard is om interpunctie en hoofdletters toe te voegen, en wanneer u dat achterwege kunt laten om tijd uit te sparen.

	Optie 1	Optie 2
1	Ik zal een overhemd, spijkerbroek, een een jack dragen.	Ik zal een overhemd spijkerbroek een een jack dragen
2	Mag ik het hebben?	Mag ik het hebben
3	Dat is Jane daar.	Dat is Jane, daar.
4	Wauw! Dat is verbazingwekkend!	Wauw, dat is verbazingwekkend
5	Ik vind het lekker maar hij niet.	Ik vind het lekker, maar, hij niet.

Problemen met Touch Access oplossen

Probleem	Oplossingen
Per ongeluk knoppen selecteren.	■ Controleer of de persoon het scherm van het apparaat duidelijk kan zien. ■ Verplaats het apparaat om te zien of een andere positie de toegang beter kan ondersteunen. ■ Verleng de tijd dat u het scherm moet aanraken voordat uw aanraking wordt herkend. Hiervoor moeten drie instellingen worden ingeschakeld. 1 Schakel Aanraakaanpassingen aan. <i>iPadOS-instellingen > Toegankelijkheid > Aanraken > Aanraakaanpassingen</i> 2 Schakel in hetzelfde menu de optie Duur van drukken in en pas de tijd aan.  Opmerking De instelling Duur van drukken wordt onmiddellijk toegepast, dus u moet uw aanraakselecties nu gedurende de ingestelde tijd vasthouden. 3 Schakel in hetzelfde menu Veegbewegingen in en kies vervolgens een instelling voor Vereiste beweging. 'Standaard' is de meest gebruikte instelling.
De accuratesse wordt slechter in de loop van de tijd.	■ Controleer of de persoon het scherm van het apparaat duidelijk kan zien. ■ Tekstgrootte verhogen: <i>TD Talk > Instellingen > Algemeen > Tekstgrootte</i> ■ Probeer een betere positie voor het apparaat te vinden om de beweging of inspanning van de gebruiker bij het maken van selecties tot een minimum te beperken. ■ Probeer enkele van de oplossingen in het gedeelte 'Per ongeluk toetsen selecteren'. ■ Controleer of aanraakaanpassingen de nauwkeurigheid voor bepaalde perioden van de dag verbeteren (zie instructies hierboven). ■ Raadpleeg uw evaluator of oplossingsadviseur voor aanvullende opties.
Niet alle delen van het scherm kunnen worden aangeraakt.	■ Controleer of de persoon het scherm van het apparaat duidelijk kan zien. ■ Verplaats het apparaat om te zien of een andere positie de toegang beter kan ondersteunen. ■ Raadpleeg uw evaluator of oplossingsadviseur voor aanvullende opties.
Het invoeren van de wachtwoordcode is lastig of vermoeiend.	■ Als uw iPad Face ID ondersteunt, activeert u Face ID. <i>iPadOS-instellingen > Face ID en wachtwoord > Face ID instellen</i> ■ Als uw iPad Face ID niet ondersteunt, schakelt u de wachtwoordcode uit. <i>iPadOS-instellingen > Face ID en wachtwoordcode of Touch ID en wachtwoord > Wachtwoord > Wachtwoord uitschakelen</i>

Als u problemen ondervindt die niet in de bovenstaande tabel worden behandeld of als uw problemen niet kunnen worden opgelost, probeer dan de volgende stappen.

- 1 Controleer altijd of er een goede basis is om te plaatsen.
 - Verifieer of de persoon het scherm van het apparaat duidelijk kan zien. Controleer de reflectie van het scherm en, als de persoon een bril nodig heeft, zorg er dan voor dat hij/zij deze draagt.
 - Plaats het apparaat zodanig dat de persoon het scherm zonder al te veel inspanning gemakkelijk en nauwkeurig kan aanraken. De positie van het apparaat moet in de loop van de dag kunnen worden veranderd.
- 2 Raadpleeg uw evaluator of oplossingsadviseur om andere mogelijke oplossingen te vinden.

Veelgestelde vragen

Is Duur van drukken overal van toepassing?

Ja. De Duur van drukken is op het hele apparaat van toepassing. U kunt dit naar wens in- en uitschakelen in de iPadOS-instellingen.

Wat gebeurt er als aanraaktoegang moeilijk wordt?

Neem contact op met uw evaluator of oplossingsadviseur voor hulp bij het vinden van mogelijke oplossingen.

Hoe werkt zinsvoorspelling in TD Talk?

Zinsvoorspelling in TD Talk is gebaseerd op frequentie. Zinnen die u verschillende keren heeft gezegd worden voorspeld wanneer u begint met het typen van het begin van de zin. Het geeft de voorkeur aan deelzinnen (bv. Ik ga, Wat wil u) boven volledige zinnen (bv. Ik ga naar de winkel. Wat wil u in uw koffie?) omdat die in meer situaties worden gebruikt en u ze niet zo vaak hoeft te bewerken.

myTobiiDynavox.com



Uw gratis myTobiiDynavox.com-account geeft u toegang tot tal van voordelen, waaronder cloudopslag voor back-ups, de paginaset synchroniseren en delen, lesplannen en nog veel meer.

Door lid te worden kunt u:

- Veilig een back-up maken van uw systeem
- Gratis tools en hulpmiddelen downloaden
- Licenties voor partners claimen en beheren
- Meer te weten komen over beschikbare updates
- Toegang krijgen tot technische ondersteuning en veelgestelde vragen
- Paginasets en paginabundels delen



myTobiiDynavox

myTobiiDynavox.com

Aanvullende bronnen



**Tobii Dynavox-leercentrum
(alleen in het Engels)**

learn.tobiidynavox.com



Apple

apple.com/nl/accessibility



TD Facebook-community

qrco.de/TDFB



TD Talk-ondersteuningspagina

qrco.de/TDTalkHelp



Technische ondersteuning

Neem contact op met uw lokale
Tobii Dynavox-vertegenwoordiger
voor technische ondersteuning.